

L'AVENIR DE VOS SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES




KINÉSITHÉRAPIE LIBÉRALE

SWINS[®]

NOUVEAU !

Retrouvez tout votre matériel de kinésithérapie sur

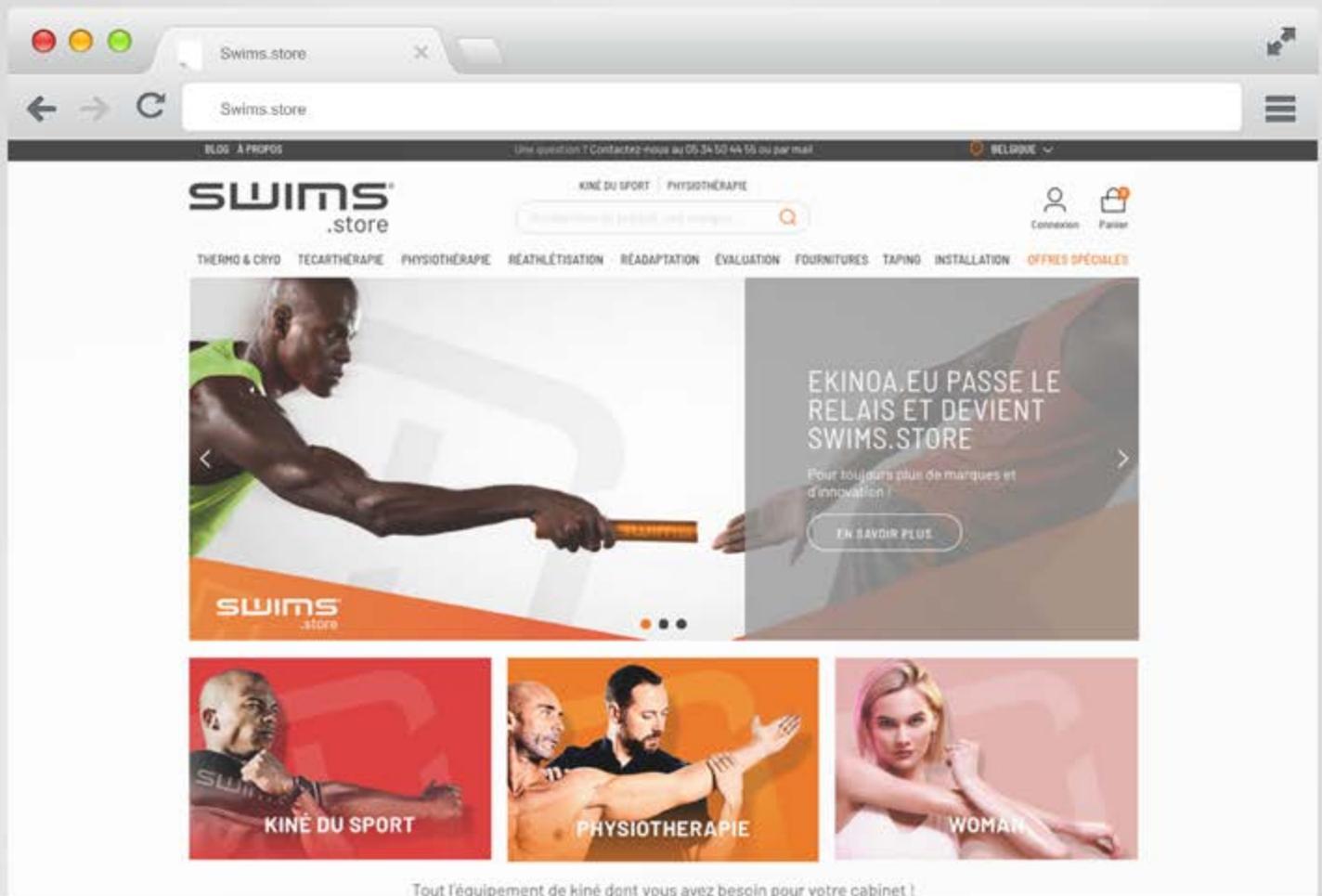

WWW.SWIMS.STORE

SWIMS
.store

VOTRE PROJET

P. 04 - 05

SWIMS est né de la fusion des groupes WINBACK, SMS, MEDIPRO et AXONE dont les équipes se retrouvent autour d'une valeur commune : mettre les professionnels de santé au centre de nos démarches. C'est en écoutant les besoins exprimés par les thérapeutes que nous avons construit nos offres de produits et services.

CRYOTHÉRAPIE

P. 06 - 23

TECARTHÉRAPIE

P. 24 - 33

LASERTHÉRAPIE

P. 34 - 39

TESLATHÉRAPIE

P. 40 - 45

PRESSOTHÉRAPIE

P. 46 - 55

RÉATHLÉTISATION

P. 56 - 69

SWIMS.STORE

P. 70 - 73



Votre projet en 6 étapes clés

SWIMS.team développe une réelle expertise dans la mise en forme de vos projets en termes d'équipements de rééducation. Nous accompagnons ainsi chaque année de nombreux cabinets dans leur installation/déménagement/extension.

ÉTAPE 1

LES BONNES QUESTIONS

- ▶ Quel type de patientèle ?
- ▶ Comment travaillez-vous actuellement ?
- ▶ Quels équipements ont retenu votre attention ?
- ▶ Comment souhaitez-vous vous distinguer ?
- ▶ Avez-vous défini un budget ?

ÉTAPE 2

CADRAGE ET LISTE D'ÉQUIPEMENTS

Sur la base de vos réponses et de vos souhaits, nous vous proposons une liste d'équipements et une démonstration pour les plus techniques. Une fois la liste validée, nous vous soumettons un premier cadrage budgétaire.

ÉTAPE 3

OFFRE COMMERCIALE

Lorsque la liste est figée et respecte le budget, nous formulons une offre complète comprenant les modalités de livraison, d'installation et de formation ainsi que notre meilleur effort commercial.

ÉTAPE 4

VALIDATION DE LA COMMANDE

À la signature du devis, nous évoquons les modalités de financement. Puis l'équipe administrative prend le relais pour approvisionner les commandes et finaliser le dossier de financement si besoin.

ÉTAPE 5

LIVRAISON ET INSTALLATION

Par nos soins généralement, elles se déroulent à un jour déterminé ensemble. Votre interlocuteur commercial est présent et procède à la mise en route des équipements ainsi qu'à un premier niveau de formation.

ÉTAPE 6

SUIVI ET SERVICE APRÈS-VENTE

Votre interlocuteur commercial s'assure que les équipements vous conviennent et que vous êtes à l'aise avec leur utilisation. Notre service technique veille à apporter une solution rapide à d'éventuels dysfonctionnements.

« Nous voulions développer un nouveau projet de cabinet plus grand et plus spécialisé en traumatologie du sport [...] Nous avons raisonné en deux temps : renouveler les équipements avec lesquels nous travaillions déjà et chercher les outils performants qui existent à l'heure actuelle. Avec la Société SWIMS, nous avons échangé sur l'intérêt et la gamme de certains produits afin d'avoir un panel d'équipements varié et performant. Nous avons sollicité plusieurs fournisseurs puisque l'investissement était important. Nous nous sommes engagés avec SWIMS car nous avons été séduits par la qualité de l'ensemble du matériel proposé. »

S.MENDEZ, SCM Sport Rééducation à Pessac (33)





Programmes de formations sur-mesure

Aussi puissants ou polyvalents que sont nos équipements, leur efficacité dépendra toujours de la façon dont ils sont utilisés. Nous apportons un soin particulier à vous accompagner dans leur prise en main.

SWIMS[®]
.academy



300
protocoles
de traitements thérapeutiques



7 000
kinésithérapeutes
formés dans le monde



50 000
traitements SWIMS
chaque jour dans le monde



200
équipes sportives
et fédérations équipées



25
pays dans le monde
représentent la swims.team

Nous nous appuyons sur nos relations quotidiennes avec plus de 7 000 thérapeutes et médecins dans les domaines de la rééducation, la médecine du sport ou la chirurgie orthopédique.

L'offre produit étoffée du groupe permet d'adapter la réponse à votre besoin en fonction de votre pratique et de votre façon de travailler.

LES FORMATIONS

L'engagement de l'académie SWIMS est de partager sa connaissance avec vous et vos confrères dans le monde entier. Ses formations, forums, réseaux sociaux vous sont accessibles. Vous pourrez ainsi échanger, apprendre, témoigner sur les techniques avec vos confrères déjà équipés.

My START

Permet de comprendre l'équipement et de découvrir comment l'exploiter avec vos propres techniques. Toutes les innovations sont présentées de manière à ce que vous puissiez vous projeter dans vos traitements.

My PRACTICE

Couvre l'ensemble des applications de l'équipement. La « formation pratique » vous place dans une situation de travail, face à des pathologies courantes, que vous traitez dans votre cabinet. Cette formation vous permet de découvrir de nouveaux domaines thérapeutiques comme la rééducation, la santé et le sport.

My EXPERT

Développe les techniques propres à un domaine d'application vues par un expert. Cette formation vous est accessible après une bonne expérience dans la gestion de l'équipement et prend en compte des protocoles intégrant d'autres technologies ou méthodes manuelles.

Inscrivez-vous sur www.swims.team

UNE COMMUNAUTÉ DE 2000 EXPERTS AVEC VOUS



Une question ? Echangez et débattiez avec vos confrères en direct sur la page communautaire Facebook qui vous est réservée. Partagez vos interrogations, vos témoignages, vos résultats - obtenez immédiatement l'avis de vos confrères.

CRYOTHÉRAPIE DYNAMIQUE

GR PRO 2.1 - GAME READY®

GAME READY® a révolutionné le protocole **RICE** (*Rest Ice Compression Elevation*) en remplaçant la glace par l'application d'une source régulée et constante de cryothérapie compressive.



CRYOTHÉRAPIE : Traitement qui consiste à appliquer du froid sur une zone du corps pour soulager certains symptômes résultants de traumatismes ou de maladies.



COMPRESSION DYNAMIQUE : intermittente agit activement sur les contractions musculaires naturelles. Grâce à son effet pompe, elle stimule le flux de sang oxygéné vers la zone lésée, aidant ainsi à la réduction de l'œdème et une meilleure pénétration du froid.



COUVERTURE CIRCONFÉRENTIELLE

L'air injecté dans les enveloppes facilite le contact avec le membre. Sa surface recouvre une large portion de la zone traitée améliorant ainsi la capacité de refroidissement continu pour une meilleure évacuation de la chaleur.



FROID PLUS RAPIDE & PROFOND

Le froid appliqué pénètre plus profondément et plus rapidement de façon durable dans le but de ralentir le métabolisme cellulaire, aidant ainsi l'organisme à minimiser les dommages sur le tissu secondaire pour une récupération toujours plus efficace.



FONCTIONNE SUR BATTERIE

Une batterie externe de 6h d'autonomie est disponible pour permettre l'application de traitement partout où cela est nécessaire, assurant une réactivité à toute épreuve.



FACILEMENT TRANSPORTABLE

Le poids léger du Grpro 2.1 permet un transport facile, une valise de transport est également disponible.



TEMPÉRATURE CIBLE RÉGLABLE

Fournit une température constante dans tout l'enveloppe, améliorant le confort et la sécurité du patient. Thérapie par le froid entre 1°C à 8°C (lorsque le réservoir de l'unité de commande est rempli de glace).



SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉES, LES VERTUS DU GRPRO2.1

Le GRPRO 2.1 génère un froid sur l'ensemble de la zone traitée, circonférentiel et parfaitement homogène, ce qui le rend très confortable et sécurisé. Les vertus thérapeutiques d'un froid intense sur le patient soulagent la douleur et favorisent les fluides afin de résorber des hématomes suite à des chocs traumatiques.

- Améliorer la fonction lymphatique
- Encourager l'apport d'oxygène au niveau cellulaire
- Accélérer la cicatrisation des tissus
- Réduire significativement la médication anti-douleur

ANTI DOULEUR INSTANTANÉE

Le froid étant immédiat (descente à 0° en 6 secondes) et homogène, l'effet antalgique est rapide et s'étend sur l'ensemble de la zone traitée. La compression accentue la pénétration du froid en profondeur dans les tissus, ce qui rallonge l'analgésie du patient durablement.

ANTI INFLAMMATOIRE & ANTI ŒDÈME

Le traitement de GRPRO 2.1 lutte contre tous les phénomènes inflammatoires tandis que la compression active (réglable et intermittente) permet de stimuler les circuits lymphatiques et sanguins. Ainsi, toutes les conséquences d'un traumatisme aigu (œdèmes, gonflements, hématomes, épanchements...) sont traitées avec cette double action qui rend le Game Ready unique au niveau thérapeutique.

Patrick Mangin, kinésithérapeute à Toulouse témoigne : « Par exemple, des patients souffrant de périarthrites d'épaule ont retrouvé un confort de vie et le sommeil après 2-3 séances de 20 à 30 minutes »

Le GRPRO 2.1 réduit considérablement la quantité de médicaments (type opiacés) administrés aux patients. Les nouveaux protocoles mis en place récemment par l'équipe de la clinique des Cèdres de Cornebarrieu (1000 procédures par an) vont même plus loin puisque les cathéters fémoraux sur les PTG ont été supprimés pour un indice de douleur (VAS) proche de 0.

« Depuis plus d'un an maintenant, nous avons intégré l'utilisation de Game Ready dans nos process de récupération rapide après chirurgie afin de réduire la douleur l'apparition d'hématomes et œdèmes. Nous avons grandement réduit nos durées moyennes de séjours et réalisé une part importante de ces interventions en ambulatoire (30%). » ROMAIN DOMPS, Directeur de la clinique de Domont dans le Val d'Oise.

ACCÉLÉRATION DE LA RÉÉDUCATION

Que ce soit en traumatologie du sport ou en traitement post opératoire, patients comme thérapeutes indiquent que le Game Ready leur a permis de récupérer plus vite et ainsi de retourner à la compétition, à une activité physique ou tout simplement au travail plus rapidement.

L'étude clinique (multisites 400 patients) publiée récemment dans le British Journal a permis de mettre en évidence une corrélation significative entre l'utilisation du Game Ready (vs technique de glaçage et de compression statique) et une amélioration beaucoup plus rapide des capacités fonctionnelles de patients.





CHIRURGIEN



Plus de 800 chirurgiens prescrivent Game Ready® en traitement post-opératoire du genou. Plus de 200 hôpitaux sont équipés.



KINÉSITHÉRAPEUTE

Plus de 1500 kinés équipés traitent médicalement des patients avec les équipements Game Ready®. Ce sont plus de 5000 traitements qui sont effectués tous les jours.



MÉDECIN DU SPORT



90% des médecins du sport dans les équipes professionnelles recommandent Game Ready® en post traumatique. Plus de 800 sportifs de haut niveau l'utilisent minimum une fois par semaine.

Game Ready® s'adapte aux traitements de nombreuses problématiques et peut être utilisé sur tous types de patients. S'équiper de Game Ready®, c'est s'assurer de pouvoir répondre encore plus efficacement à leurs besoins.

POURQUOI GAME READY® EST UNIQUE ?

Programmes alternant temps de traitement et de temps de pause permettant de laisser l'appareil fonctionner en continu sur le patient

Capteurs de température et de pression garantissant la mise en sécurité

Température mesurée et contrôlée en fonction de la sensibilité du patient



GAME READY® ACCÉLÈRE LE PROCESSUS DE GUÉRISON

96%

disent que GAME READY® offre une meilleure rééducation post-opératoire qu'un traitement de cryo utilisé précédemment.

87%

déclarent que GAME READY® les a aidé à réduire les antalgiques ou les a aidé à arrêter plus tôt les médicaments.

98%

sont satisfaits que leur kiné ou leur médecin leur ait proposé GAME READY® comme option pour leur rééducation.



GAME  READY®
ACCELERATED RECOVERY SYSTEM

HUMAN INSPIRED,
TECHNOLOGY DRIVEN



THÉRAPIE CONTRASTÉE

MED4 ELITE™ - GAMEREADY®

Le **Med4 Elite™** multimodal pour deux utilisateurs de **GAMEREADY®** combine la **cryothérapie sans glace**, la **thermothérapie**, la **thérapie à contraste rapide** et la **compression active** dans un seul système de rétablissement révolutionnaire pour la traumatologie et le traitement post-opératoire.





LE MED4 ELITE™ REPRÉSENTE
**LA TECHNOLOGIE LA PLUS
 INNOVANTE ET COMPLÈTE**
 À L'HEURE ACTUELLE,
 POUR LA RÉCUPÉRATION.

DONALD A. CHU, PHD, PT, ATHERCARE
 FITNESS & REHABILITATION



CRYOTHÉRAPIE
 ACTIVE



THERMOTHÉRAPIE
 ACTIVE




THERAPIE PAR
 CONTRASTE



2 PATIENTS
 SIMULTANÉMENT



COMPRESSION
 ACTIVE

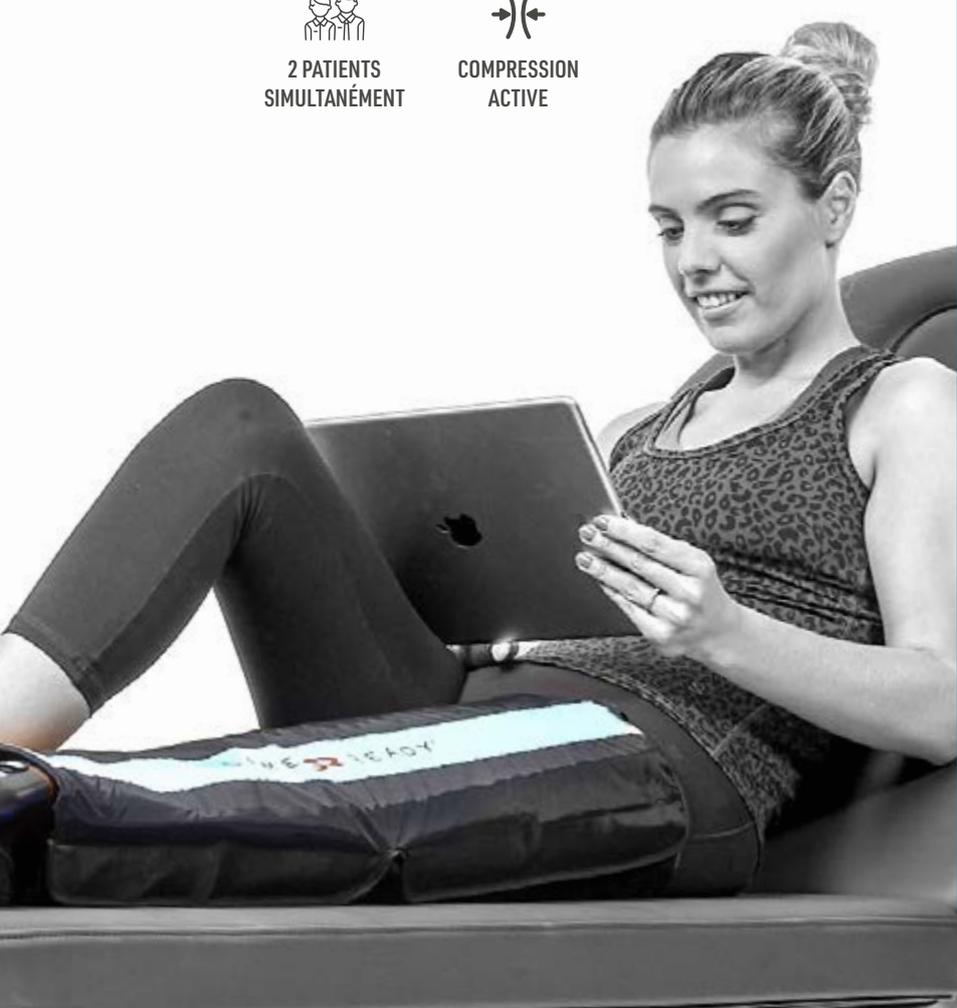

GAME READY® ACCÉLÈRE LE PROCESSUS DE GUÉRISON

Dans les sondages réalisés
 auprès de plus de 9700
 patients, ces derniers dé-
 clarent...

96%

disent que GAME READY® offre
 une meilleure rééducation post-
 opératoire qu'un traitement de
 cryo utilisé précédemment.

87%

déclarent que GAME READY®
 les a aidé à réduire les antal-
 giques ou les a aidé à arrêter
 plus tôt les médicaments.

98%

sont satisfaits que leur kiné ou
 leur médecin leur ait proposé
 GAME READY® comme option
 pour leur rééducation.



Développée sur la base d'un projet de la NASA, l'enveloppe à double chambre GAME READY[®] associe le froid et la compression de manière unique afin d'abaisser significativement la température corporelle sur une large zone de façon homogène.


Le froid pénètre alors plus profondément et est maintenu plus longtemps pour un résultat optimal.





UN FROID
DURABLE (analgésique)

LA GAMME D'ENVELOPPES GAME READY®

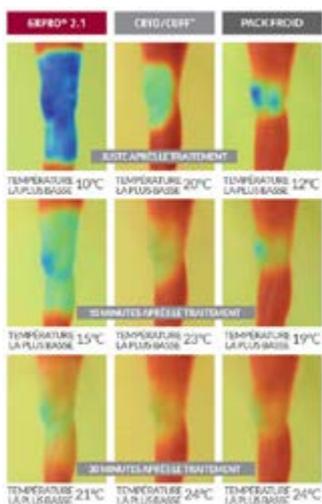



LA COMPRESSION DYNAMIQUE

La compression dynamique exercée à travers les enveloppes est **réglable** (de 0 à 75mmHg), **graduelle et intermittente**. La compression est homogène sur l'ensemble de la zone articulaire/ musculaire. Celle-ci permet de :

- Amplifier la **pénétration du froid** en profondeur dans les tissus
- Exercer un **effet pompe drainant** accélérant le rétablissement des circuits lymphatiques et sanguins
- Parfaitement **épouser l'articulation**

UNE ENVELOPPE ANATOMIQUE POUR CHAQUE MEMBRE

Les enveloppes sont composées de deux éléments :

- La partie technique à double chambre (une pour le froid et une pour la pression). **La chambre dédiée au froid** est composée d'un circuit à travers lequel circule l'eau glacée (froid diffus et homogène sur toute la zone). **La chambre dédiée à l'air** est alimentée par un compresseur et régulée par un rétrocontrôle mesurant le niveau de pression dans la chambre. Ce procédé permet d'obtenir une compression et une décompression réglables et progressives.

- La housse qui est entièrement déhoussable et lavable à la machine






L'APPLICATION LOCALE DE THERMO
CRYO FAVORISE LA GUÉRISON DES
TISSUS ENDOMMAGÉS ET RÉDUIT
L'INTENSITÉ DE LA DOULEUR



WINSHOCK®

Winshock est composé de 2 générateurs thermoélectriques pour atteindre très rapidement des seuils de température extrêmes (de -15°C à 45°C en 25 sec). La technologie alterne un traitement cryothérapie et une hyperthermie avec une précision au dixième de degré près. Winshock offre une large plage de traitements avec des températures fixes ou des programmes d'alternance chaud/froid favorisant la cicatrisation et la circulation sanguine et lymphatique.


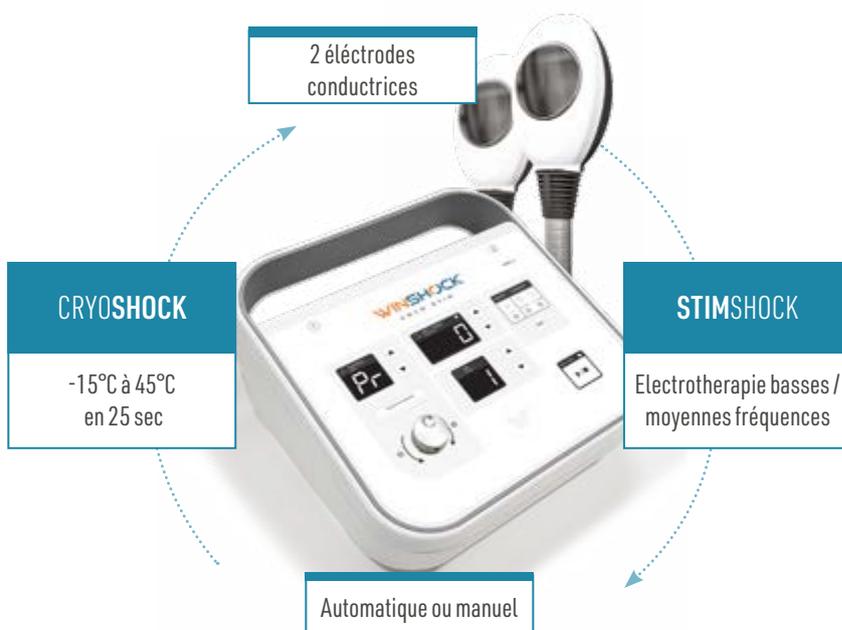


- 
CRYOTHÉRAPIE ACTIVE
- 
THERMOTHÉRAPIE ACTIVE
- 
THERAPIE PAR CONTRASTE
- 
ELECTROTHERAPIE
- 
PORTABILITÉ EN PLUS

CRYOSHOCK

Le froid qui pénètre à la zone ciblée a un effet antalgique immédiat et durable.

Les vaisseaux sanguins contractés ralentissent le flux sanguin ce qui empêche la propagation de l'œdème. Cela accélère ainsi la guérison des tissus endommagés.

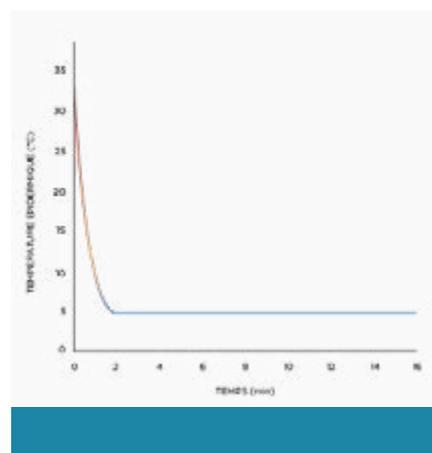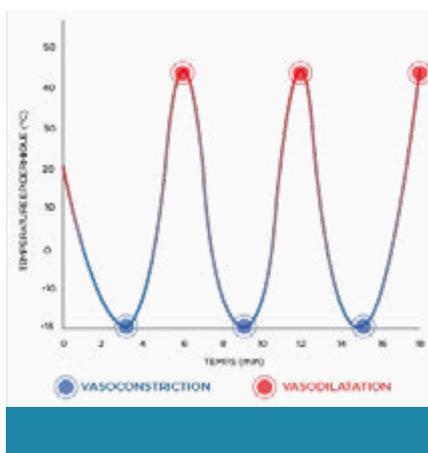

STIMSHOCK

STIMSHOCK est associé à CRYOSHOCK pour amplifier les effets du froid/chaud en profondeur à l'aide de courants de moyennes et basses fréquences PUSH & PRESS. Ces courants passent au travers des deux électrodes génératrices de froid ou par des stim pads.

PUSH IN
(Froid plus pénétrant)

Cette fonction ne peut être utilisée qu'en programme manuel avec une température maximale de +15°C. Ce programme permet une meilleure pénétration du froid en profondeur. Il présente des effets anti-inflammatoires et atténue durablement la douleur.

PUSH BACK
(Drainage accéléré)

Cette fonction stimule la circulation de retour de la lymphe vers les ganglions lymphatiques en accélérant l'évacuation des lymphœdèmes, notamment en phase post-opératoire.

PRESS
(Rééducation musculaire)

Ce mode renforce les muscles en profondeur avec une stimulation confortable. Il recrute les muscles pour faciliter la rééducation et diminuer le temps de récupération nécessaire, notamment après un traumatisme.



LES BÉNÉFICES

RÉDUIT LA DOULEUR

Analgésique la cryothérapie bloque le message de la douleur pour une durée de 3 à 6 heures

DIMINUE L'INFLAMMATION

Réduit fortement la production des médiateurs chimiques responsable de la réaction inflammatoire

RÉSORBE L'ŒDÈME

Vasoconstriction réflexe pour réduire l'épanchement de l'œdème et accélérer le drainage de la zone lésé.

RELÂCHE LES TENSIONS

Myorelaxant, diminue la spasticité musculaire afin de lever les contractures

TRAITEMENTS

MANUEL



AUTOMATIQUE



Winshock offre une large plage de traitements avec des températures fixes ou des programmes d'alternance chaud/froid favorisant la cicatrisation et la circulation sanguine et lymphatique.

CRYO

CRYO THERMO

De 5 à 50 min - Choisissez votre température entre -15°C et 45°C

THERMO



CRYOSHOCK

Cycle de 1 à 8 fois (6 min) -
4 MIN CRYO (-5°C)
2 MIN THERMO (+40°C)



THERMOSHOCK

Cycle de 1 à 8 fois (6 min) -
4 MIN THERMO (+40°C)
2 MIN CRYO (-5°C)

WINSHOCK®

DURÉE DES TRAITEMENTS

L'application locale de THERMO CRYO favorise la guérison des tissus endommagés et réduit l'intensité de la douleur. Il agit contre l'inflammation, les œdèmes, les hématomes, en accélérant les phénomènes de détersion et de réparation tissulaire et en favorisant le drainage utile à l'élimination des toxines.



Durée du traitement :
1 à 30 min

3' **DOULEURS**
Gate Control : Réduction localisée et temporaire de la conduction nerveuse (analgésie)

15' **TRAUMATOLOGIE**
Vasoconstriction artérielle et capillaire pour limiter la formation des œdèmes

5' **INFLAMMATION**
Réduction localisée du processus inflammatoire par limitation enzymatique

15' **RÉÉDUCATION**
Améliorer l'activité métabolique avec une stimulation profonde en limitant toute inflammation ou douleur

RETOUR AU CALME
01min
RHUMATOLOGIE
20min
PHLÉBOLOGIE
30min
RÉCUPÉRATION SPORTIVE 30min

DEUX LOGIQUES DE TRAITEMENTS

INFLAMMATIONS CHRONIQUES

ANTI INFLAMMATOIRE & ANALGÉSIQUE par CHOC THERMIQUE de (X) cycle(s) de 6 minutes.

Hypothermie localisée de 4 minutes entraînant une chute de la température de l'épiderme de 25°C suivi d'une hyperthermie immédiate afin de stopper l'inflammation. L'appui de la fonction PUSH-IN améliore la pénétration du froid.

HYPO

HYPER

HYPO

HYPER



INFLAMMATIONS AIGÜES

ANTI ŒDÉMATEUX & CONTRÔLE DE L'INFLAMMATION VASOCONSTRICTION PERSISTANTE 10 à 20 minutes

Lorsque l'hypothermie persiste, l'installation du froid inhibe le processus inflammatoire. L'évacuation des fluides s'effectue grâce à une accélération du drainage avec l'appui de la fonction PUSH-BACK

HYPO

HYPER




ÉTUDES DE CAS

Exemple de protocole sur une fracture du coude. J+3 semaines après plâtre.

OBJECTIFS : Entretien musculaire, gain en amplitude, antalgie, anti-inflammatoire

TEMPS	MODE	MÉTHODE	ACCESSOIRE
3x6min cycles Cryoshock	PRESS	Pad en regard du foyer de fracture, un stim pad sur le biceps et un stim pad sur les fléchisseurs de l'avant-bras	1.1

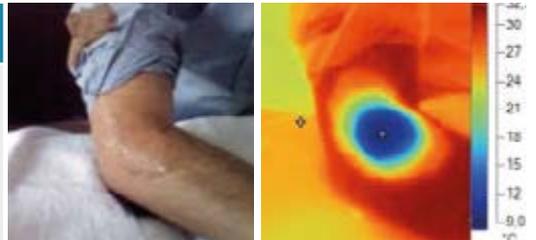

NOUVEAU!

Soyez encore plus précis dans vos traitements. Grâce à ses nouveaux pads ainsi que les mouse pads qui peuvent venir les remplacer, la Winshock s'adapte encore mieux à vos besoins et ceux de vos patients.



TECARTHÉRAPIE



BACK 1S
WINBACK

P.26



BACK 3SE
WINBACK

P.26



Pour prévenir,
soulager et
guérir.



venir, soigner,
t accélérer la



TECARTHÉRAPIE BACK 1S & 3SE - WINBACK

TECHNOLOGIE - PRINCIPE DE BASE

La tecarthérapie Winback vous accompagne au quotidien dans votre pratique manuelle, en amplifiant l'efficacité de votre massage, et ce grâce au courant T.E.C.A.R.

Il existe plusieurs types de courants électriques, tous n'ont pas les mêmes effets sur le corps humain. Le courant tecar appartient aux hautes fréquences.

La tecarthérapie se distingue de l'électrostimulation ou de l'ultrason par une plage de fréquence comprise entre 300 et 1 000 kHz. Dans cette plage de fréquence, le courant est naturel et non invasif : il agit au niveau cellulaire.



ÉLECTRODE MOBILE (CET ou RET)

Vous pilotez l'électrode MOBILE afin de découpler l'action de votre massage.



ÉLECTRODE FIXE (Plaqué de retour)

Votre deuxième électrode est FIXE, elle se met au contact du patient et ferme le circuit électrique avec l'électrode mobile.



LES BÉNÉFICES

Le courant Tecar permet l'ouverture des canaux ioniques qui favorisent l'accélération des échanges intra et extra cellulaires.

IL EN RÉSULTE 3 BÉNÉFICES SUR LE CORPS :

1 ÉLIMINER *la douleur*

L'énergie WINBACK bloque l'information de la douleur pour une durée supérieure à 48 heures. Votre patient ressent un bien-être et se relâche ; votre massage devient ainsi très performant.

2 LIBÉRER *le mouvement*

L'énergie WINBACK libère les tensions (contractures, œdèmes, fibroses) en les revascularisant localement. Il vous suffit de 2 minutes sans effort pour lever une contracture en profondeur.

3 ACCÉLÉRER *la cicatrisation*

L'énergie WINBACK accélère le système naturel d'autoréparation du corps en favorisant les échanges intra et extra cellulaires d'une manière durable. Les bénéfices se prolongent après la séance.

RÉÉDUCATION 2X PLUS RAPIDE ⁽¹⁾	CICATRISATION 97% D'EFFICACITÉ ⁽²⁾	ANTI-DOULEUR 81% IMMÉDIAT & DURABLE ⁽³⁾	VASCULARISATION 6X PLUS RAPIDE ⁽⁴⁾
--	--	---	--

(1) Résultats deux fois plus rapides sur la rééducation de coiffe de rotateur. L'énergie WINBACK provient de la technologie « TECAR », terme utilisé par les études scientifiques depuis 1995. T.E.C.A.R Thérapie. Nouvelle tendinopathie de la coiffe de rotateur: notre expérience. G. Sanguedolce, C. Venza, P. Cataldo, G. Letizia Mauro - Président de la médecine physique et de la rééducation- Université de Palerme. Sept 2009. Fréquence utilisée 500KHz (2) En 6 séances, 97% d'efficacité sur les troubles musculaires et articulaires. Evaluation des effets de la multi fréquence en mode d'application capacitive pour les traitements en diathermie. S Piolani, A Soldadi, F Speziale, P Bonifacci, T Cuzzani, M Scacchetti, A Marsotti, S Alberti, M Cagnani, R Marzovillo, A Garvalli, G Poletti. Pulication Sport & Medicina. Jan/Feb 2009. Fréquences utilisées 500 KHz, 750 KHz et 1 Mhz. (3) Etude Clinique du Transfert Electrique en Hyperthermie pour le traitement de lumbago. K TAKAHASHI, N TSUZUKI, K ZHONG-SHI - Département de chirurgie orthopédique - Saitama Medical Center- J. Phys Ther. Sci 11 :45-51, 1999. Fréquence utilisée 650 KHz. (4) T.E.C.A.R Thérapie. Traitement post-opératoire de la fracture du fémur. A. TERRANOVA, G. VERMIGLIO, S. ARENA, A. CICCIO, S. DI DIO, M. VERMIGLIO - Vol. 44 - Suppl. 1 to No. 3 EUROPA MEDICOPHYSICA - Oct. 2008. Fréquence utilisée 500KHz.

NIVEAUX DE THERMIE

Afin de traiter au mieux les diverses pathologies et leurs spécificités propres, Winback offre la possibilité de travailler à plusieurs niveaux de thermie.

THERMIE FORTE

(CAPSULITE, FIBROSE...)

THERMIE SOUTENUE

(PRÉPARATION TISSULAIRE, CONTRACTURES...)


THERMIE DOUCE

(AUGMENTATION DE LA MICRO CIRCULATION...)

ATHERMIE

(DÉCHIRURE, ŒDÈMES...)

BRISER LE CYCLE DE LA DOULEUR

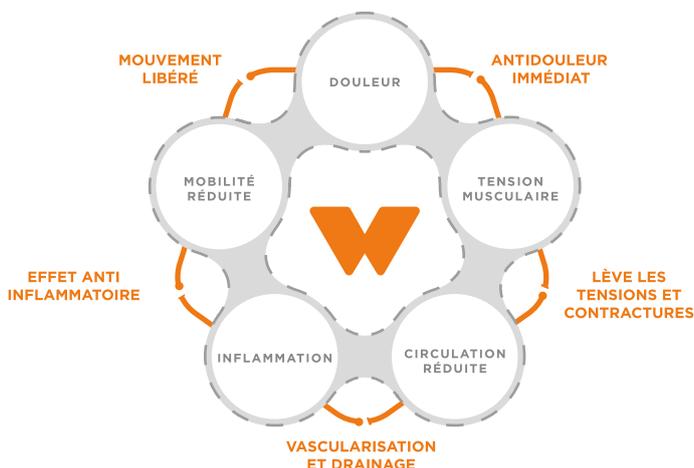

INDICATIONS & CONTRE INDICATIONS

TRAUMATOLOGIE : antalgique, anti-inflammatoire, anti-oedème & accompagne sur les traitements des fractures, entorses, déchirures musculaires...

RHUMATOLOGIE : arthrose, arthrite, tendinopathies, cervicalgie, lombalgie...

KINÉSITHÉRAPIE DU SPORT : récupération sportive, renforcement musculaire, prévention...


URO-GYNÉCOLOGIE : soin post-accouchement, rééducation et cicatrisation pelvi-périnéale, endométriose...

CONTRE INDICATIONS : Pace maker, pompes à insuline, thrombophlébite, grossesse, cartilage de croissance, insensibilité au chaud, cancer, fièvre, infection. Pas de contre-indications au matériel prothétique, les cellules physiologiques uniquement répondent au courant





L'ÉNERGIE **WINBACK** ACCÉLÈRE LA RÉÉDUCATION

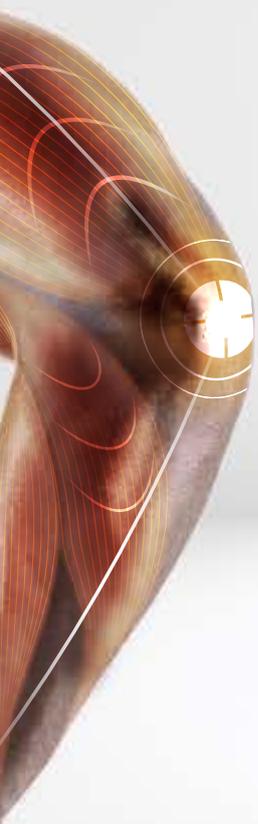

WINBACK[®] | POWERED BY **SWIMS**[®]

WINBACK

TRAITEMENTS

Les équipements Winback permettent de traiter des pathologies très variées et ont déjà convaincu de nombreux thérapeutes. Domaines d'application, protocoles utilisés et avis de praticiens se mêlent pour vous offrir un aperçu de ce que l'énergie Winback peut vous apporter au quotidien.

TRAITER LES ENTORSES AVEC LA TECARTHÉRAPIE

La tecarthérapie Winback peut être utilisée pour traiter, par exemple, l'entorse aigüe de la cheville. On commence par la stimulation vasculaire du creux poplité avec l'électrode convexe, puis l'on procède à un massage des muscles fibulaires et du tibial postérieur (mode CET) avant d'appliquer tout autour du coup de pied afin de réduire l'œdème (mode CET lowpulse). Enfin, on peut finir le traitement 2 à 3 minutes sous le calcanéum, avec le mode RET lowpulse.

L'autre intérêt, une fois que la cheville a dégonflé et que l'entorse n'est plus en phase aigüe, est d'accélérer la cicatrisation ligamentaire, en utilisant le mode CET ou les bracelets. Cela permet un réel gain de temps, car l'antalgie permet une reprise plus rapide de l'exercice. Enfin, la dernière étape de la rééducation prendra la forme d'exercices de proprioception pour que le patient retrouve ses sensations et que le ligament redonne les bonnes informations quant à la position de la cheville.



2 à 3 fois par semaine sous Winback elle est parvenue à terminer son marathon, et sans douleur.



En cas d'entorse encore douloureuse après plusieurs semaines, la Tecar 6.0 apporte une solution rapide pour restaurer l'élasticité et diminuer la douleur du fait de ses fortes actions collagéniques et antalgiques.

TRAITER UNE PATHOLOGIE CHRONIQUE DE L'ÉPAULE EN 3 ÉTAPES (CAPSULITE)

Objectifs :

- Casser les adhérences
- Relâcher les fascias et les tensions musculaires
- Revascularisation de la capsule
- Faciliter la mobilisation articulaire

1 Tecar 6.0 sur les Trigger Points



2 Casser les adhérences fasciales



3 Focus articulaire



*Je sens une amélioration que j'obtenais beaucoup plus lentement avec le traitement de tecarthérapie « classique ». Je la **recommanderais à mes confrères** car c'est un outil de plus contre la douleur chronique.*

Pierre Blanc, masseur-kinésithérapeute à Villenave-d'Ornon

TRAITER LA LOMBALGIE AVEC WINBACK

Une lombalgie dont la durée est supérieure à 3 mois, se manifestant de façon progressive ou par des récurrences, est appelée lombalgie chronique. Elle constitue le symptôme le plus fréquent d'une arthrose lombaire. Dans le cas d'une lombalgie chronique arthrosique, **Winback permettra de relâcher rapidement les tensions des muscles paravertébraux ainsi que la pression exercée sur les vertèbres touchées par l'arthrose.**

Protocole lombalgie chronique :

Pour les lombalgies aiguës de type lumbago, l'utilisation de la técarthérapie Winback **permet de soulager instantanément la douleur** et d'obtenir un **relâchement musculaire immédiat**. Winback simplifie le travail du praticien en **facilitant les mobilisations** grâce à une diminution importante de la douleur. Aussi, cette technologie constitue une excellente alternative à la prise de médicaments contre la douleur, qu'ils soient de type anti-inflammatoire ou myorelaxant (*visant à décontracter les muscles*). Pour les lombalgies avec hernie discale, l'action de Winback sera de **diminuer l'inflammation en améliorant la vascularisation autour du disque intervertébral**, ce qui permettra un **drainage plus rapide associé à l'effet antalgique.**



WINBACK

INNOVATIONS WINBACK TECAR



Winback Therapy est une gamme de solutions adaptées à toutes les pratiques des kinésithérapeutes pour leur offrir une maniabilité, un confort et une liberté d'action inégalés. Elle permet aux professionnels de venir à bout des douleurs et tensions de leurs patients, offre aux sportifs une récupération plus rapide et aide les femmes à surmonter leurs douleurs musculaires ainsi qu'à améliorer leur vécu après l'accouchement.




1.0

MODE MANUEL
1 ÉLECTRODE MOBILE
+ 1 ÉLECTRODE de retour



2.0

MODE MAINS LIBRES
2 ÉLECTRODES FIXES
(fix pad, flex pack, ...)

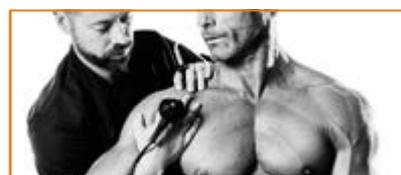

3.0

MODE EXPERT
2 ÉLECTRODES MOBILES
(une dans chaque main)



4.0

MODE EXPRESS
2 ÉLECTRODES EN UNE
(mix3 face & mix3 body)



5.0

MODE INTELLIGENT
3 ÉLECTRODES POUR
RÉPARTIR L'ÉNERGIE




6.0

MODE RET CHOC
1 ÉLECTRODE THERMIQUE
+ 1 ÉLECTRODE DE RETOUR

LES OPTIONS



PACK FLEX
1 SANGLE ABDOMINALE + 2 SANGLES BRAS + 2 SANGLES JAMBES

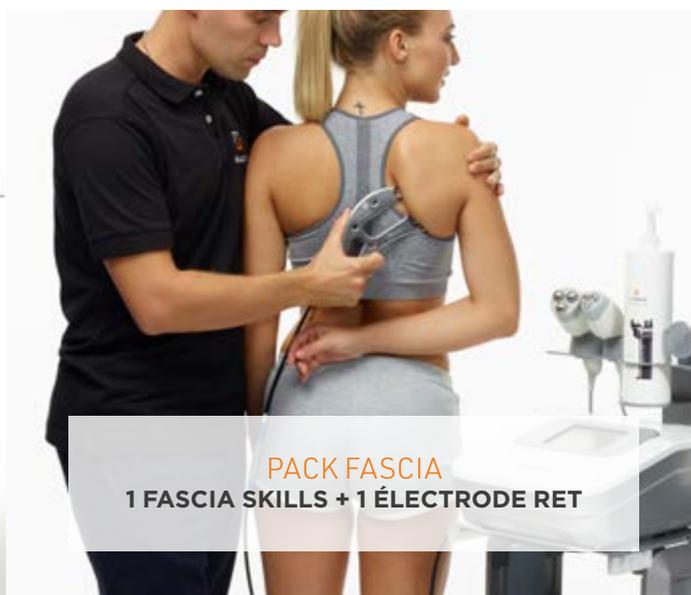

PACK FASCIA
1 FASCIA SKILLS + 1 ÉLECTRODE RET

BACK1S - L'ÉNERGIE WINBACK, LE POIDS EN MOINS

La Back 1S offre tous les bénéfices de la technologie Winback avec un poids minimum pour un maximum d'efficacité ! Ses 4 kilos lui permettent de suivre un thérapeute dans tous ses déplacements sans encombre. Sa valise a été spécialement développée à cet effet. Domaines d'application : THERAPY - SPORT.



- Puissance : CET 400 VA - RET 100 Watts
- Fréquence : 500 KHz & 300 KHz
- Fonction : Dynamic - Low pulse Super pulse - TIC - SCAN
- Formation : MyPRACTICE
- Poids : 4 kg.
- Valise de transport en option
- Garantie 2 ans équipement - 1 an accessoires.
- Fabriqué sous normes ISO9001 - ISO13485 - KIWA 1984.
- Normes : CE MEDICAL
- WINBACK 1.0
- EN OPTION
- WINBACK 2.0
- WINBACK 3.0
- WINBACK 5.0

BACK3SE - PERFORMANCE ET POLYVALENCE

Le modèle Back 3SE est le haut de gamme de la tecarthérapie WINBACK. Elle peut être dotée des 5 types de tecarthérapie Winback (de 1.0 à 5.0). Elle est très pratique avec son porte accessoires et son chariot mobile permet de la déplacer facilement entre collaborateurs. Elle est également évolutive pour de futures innovations. Domaines d'application : THERAPY - SPORT - BEAUTY



- Puissance : CET 400 VA - RET 100 Watts
- Fréquence : 1 Mhz, 500 KHz & 300 KHz
- Fonction : Dynamic - Low pulse Super pulse - TIC
SCAN SWAP - BEAT - RET +
- Formation : MyPRACTICE - MyBEAUTY
- Chariot & porte accessoires
- Garantie 2 ans équipement - 1 an accessoires.
- Fabriqué sous normes ISO9001 - ISO13485 - KIWA 1984.
- Normes : CE MEDICAL
- Normes : CE MEDICAL
- WINBACK 1.0 , 2.0, 3.0, 4.0 , 5.0
- EN OPTION
- WINBACK 6.0
- PACK FASCIA
- PACK FLEX

THÉRAPIE LASER



TECHNOLOGIE PRINCIPE DE BASE

LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
(*lumière amplifiée par émission stimulée de radiation*).

La thérapie laser utilise la lumière (photons) pour **accélérer le processus de guérison du corps**.

Indications :

- ▶ Arthrites
- ▶ Arthroses
- ▶ Bursites
- ▶ Cervico-brachialgies
- ▶ Conséquences de traumatismes
- ▶ Déchirures
- ▶ Douleurs à l'épaule
- ▶ Douleurs articulaires
- ▶ Douleurs cranio-faciales
- ▶ Entorses
- ▶ Fasciites plantaires
- ▶ Hématomes
- ▶ Lombalgies
- ▶ Œdèmes
- ▶ Plaies
- ▶ Tendinites

Contre-indications :

- ▶ Grossesse
- ▶ Cancers
- ▶ Pacemaker
- ▶ Zone thyroïdienne
- ▶ Tatouages
- ▶ Cartilage de croissance
- ▶ Infections ou maladies de peau
- ▶ Injections de stéroïdes (dans les 2/3 semaines)



PHOTOTHERMIQUE

Augmentation de la réaction biochimique et vasodilatation modérée.

PHOTOCHIMIQUE

Amélioration du métabolisme cellulaire, accélération du processus biologique.

PHOTOMÉCANIQUE

Accélère la remise en mouvement des processus physiologiques

TROIS NIVEAUX D'ACTIONS PHOTOBIOLOGIQUES :

PARAMÈTRES IMPORTANTS QUI DÉTERMINENT L'EFFICACITÉ DU LASER :

- 1 La longueur d'ondes (nm) : profondeur de pénétration
- 2 Le type d'émission : continue ou pulsée
- 3 La puissance de pic (W) : efficacité en profondeur

La puissance ne détermine pas la profondeur de pénétration (c'est la longueur d'onde) mais l'efficacité en profondeur.

THÉRAPIE LASER MLS® MULTIWAVE LOCKED SYSTEM




MLS = Multiwave Locked System = "système à impulsion de plusieurs longueurs d'ondes combinées et synchronisées"

Laser avec système de diodes. Brevet US et Certification FDA.



PRODUIRE UN MAXIMUM DE RÉSULTATS
EN UN MINIMUM DE TEMPS EN TOUTE
SÉCURITÉ

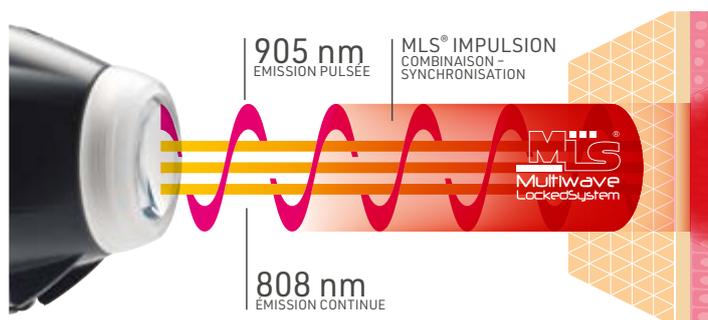

IMPULSION UNIQUE, ACTION UNIQUE

Agir en profondeur tout en évitant l'hyperthermie invasive grâce aux deux longueurs d'ondes idéalement sélectionnées (808 et 905 nm). De la puissance à la discipline: ASA s'oppose aux idées préconçues de l'atteinte de tissus profonds par la puissance en le prouvant avec l'appui d'études scientifiques.

La puissance contrôlée permet d'atteindre les tissus profonds en évitant les dommages thermiques.

TECHNOLOGIE BREVETÉE

1 L'impulsion MLS®

Le système MLS® est breveté par les autorités américaines et valide dans le monde entier: les deux longueurs d'ondes sont combinées et synchronisées pour obtenir les meilleurs résultats thérapeutiques.

2 Le groupe optique ASA

Second brevet d'ASA, le groupe optique permet de distribuer l'énergie de façon homogène grâce à son système de chevauchement des émissions lumineuses. Tous les tissus de la zone ciblée sont donc activés en même temps grâce à l'activation homogène des photorécepteurs.

TRAITEMENT MLS® - EFFETS THÉRAPEUTIQUES



Durée du traitement :
3 à 10 min



➤ Anti-inflammatoire & anti-douleur

L'impulsion MLS® produit des effets photothermiques adaptés à la résolution du processus inflammatoire et la réabsorption de l'œdème. Ces résultats, cumulés à l'action antalgique du traitement, sont à l'origine de la réduction rapide de la symptomatologie douloureuse décrite par de nombreuses études cliniques.



➤ Circulation stimulée

Les effets photothermiques et photomécaniques continuent à remettre en mouvement les tissus lésés tout en levant les tensions (fibroses, contractures, œdèmes) afin de gagner en amplitude et de relancer les processus physiologiques du patient (trophisme, homéostasie).



➤ Cicatrisation durable


L'impulsion MLS® accélère le métabolisme cellulaire grâce à son action photochimique (photon lumière concentrée). Ses vertus thérapeutiques favorisent une meilleure cicatrisation des tissus musculaires et articulaires pendant et après la séance. Celle-ci est plus rapide et meilleure.



MPHI : 25 W / PORTABLE ET TÊTE MANUELLE

Laser portable livré avec sa malette de transport. Les effets bénéfiques de la Thérapie Laser MLS® aussi bien dans votre cabinet qu'à domicile.

-  Léger
-  Écran tactile résistif
-  Autonome
-  Transportable

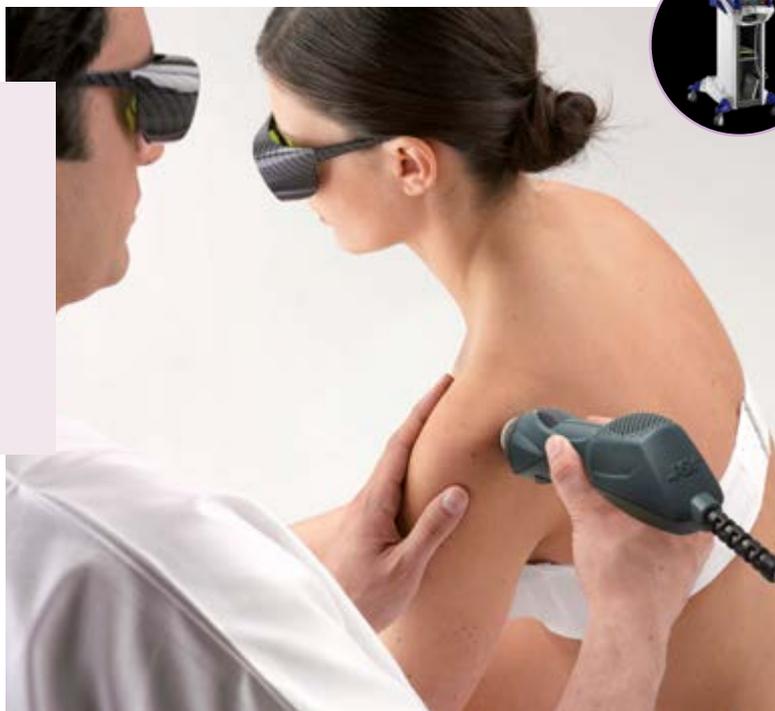

M6 : 25 W / TÊTE MANUELLE + 3 x 25 W / TÊTE ROBOTISÉE



**TRAITER EN MÊME TEMPS
UNE OU PLUSIEURS ZONES ENTières**

Le fonctionnement multicibles du M6 avec sa tête robotisée est possible grâce au groupe optique exclusif multi-diodes MLS® par lequel une région entière est traitée instantanément, permettant une réponse immédiate des tissus et de meilleurs résultats thérapeutiques.

M6 permet également l'utilisation simultanée de la poignée manuelle (25Wpic) et de la tête robotisée (3x25Wpic).

5 DIRECTIONS CONFIGURÉES

Verticale - Droite - Gauche - 2 x Horizontales



MiS : MLS® EN HAUTE PUISSANCE DE PIC / NEUROPATHIES PÉRIPHÉRIQUES



Les différentes longueurs d'ondes assurent une diffusion maximum du mix énergétique MiS sur la zone traitée. La technologie optique adoptée permet un profil de faisceau uniforme et une distribution d'énergie homogène sur la zone cible.



Tête légère, compacte et multifonctionnelle. Le système permet de calibrer automatiquement la puissance en fonction de plusieurs types de têtes proposées (de 2 cm à 5 cm de diamètre du faisceau).




MiS est la combinaison de l'expérience MLS® et des caractéristiques de haute intensité, typiques de Hilterapia®. Il réunit la **puissance pulsée** de Hilterapia® avec l'**action synchronisée** de MLS®. Les pulsions courtes stimulent l'effet photochimique particulièrement indiquée pour les neuropathies périphériques.

TABLEAU COMPARATIF



	MPHI	M6	MiS
Pointeur optique	X	Groupe optique Ø 2 cm	
		Robotisé - 3 sources Laser Ø 5 cm <i>(jusqu'à 3.3 W - Puissance pic 3x25W)</i>	Puissance moyenne 6W - Puissance du pic 1000 W <i>(valides pour tous les pointeurs MiS)</i>
Modulation MLS® (Multiwave Locked System)	CPW et FPW (Émission synchronisée de Continuous et Pulsed Wave)		
Fréquence de modulation	1 à 2000 Hz		
Longueur d'onde	Longueur d'onde 808 nm (émission continue) - 905 nm (émission pulsée)		
Dimensions - Poids	36 x 28 x 10 cm - 3 kg	68 x 42 x 158 cm - 43 kg	56 x 47,4 x 147 cm - 25 kg
Alimentation	Batterie à polymères de lithium Alimentateur externe 18Vdc 50VA	85/110VA 100/240Vdc	Alimentateur externe 18Vdc 50VA

THÉRAPIE LASER HILTERAPIA® HIGH INTENSITY LASER THERAPY

HILTERAPIA® = High Intensity Laser Therapy
= technique thérapeutique basée sur une émission laser de très forte intensité
Brevet US et Certification FDA.

Hilterapia®



PÉNÈTRE EN **PROFONDEUR**
DANS TOUS TYPE DE PEAU
SANS PERTE DE PUISSANCE




Traitement rapide

TRAITEMENT HILTERAPIA® - EFFICACITÉ THÉRAPEUTHIQUE



L'intensité obtenue non atteinte par les autres technologies laser disponibles permet de soigner efficacement même les lésions chroniques profondes. La durée et la fréquence de l'impulsion HILTERAPIA® permet de travailler en toute sécurité en maintenant la température de la peau constamment en-dessous du seuil de dommage thermique.

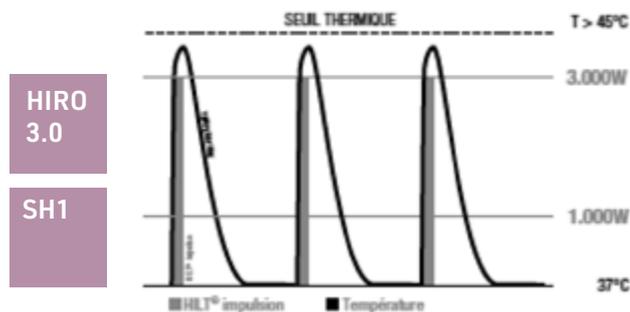

SH1 : 1000 W / 5.000 W/cm²

HIRO 3.0 : 3000 W / 15.000 W/cm²

Solution transportable rapide et efficace contre les œdèmes et les pathologies musculaires. Il réduit la douleur dès les premières applications.



Outil le plus complet, il atteint des pics de puissance très élevés qui ne sont atteints actuellement par aucune autre technologie laser. Il permet de soigner les lésions chroniques les plus profondes. Il est équipé d'une poignée manuelle standard 5mm pour la thérapie de la douleur et de DJD (Dejenerative Joint Disorder) pour la thérapie régénérative.




HIRO TT : 3000 W + SMARTCOOLER / 15.000 W/cm²



Dernière innovation, cette stratégie thérapeutique est basée sur le principe d'échange thermique qui stimule la réactivation de la circulation et le processus de guérison photobiologique, ce qui amplifie l'effet photomécanique et donc la réparation des tissus.

- Intervention immédiate
- 1 fibre optique + 3 têtes laser
- Intense, profond et sécurisé
- Actions simultanées

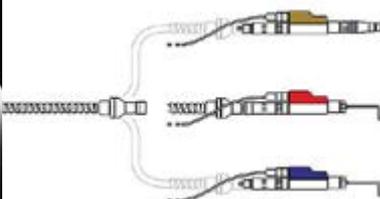

Trois têtes laser adaptées à chaque traitement :

- Thérapie régénérative
- Thérapie de la douleur
- Thérapie sur zone sensible

La puissance du laser Nd:YAG combinée au système de refroidissement "SmartCooler" diminue la température de la peau et les tissus sous-jacents entre 18°C et 28°C.

TABLEAU COMPARATIF



	SH1	HIRO 3.0	HIRO TT
Pointeur	Standard 5 mm	Standard 5 mm + DJD	Standard 5mm + DJD + 10mm + SmartCooler
Modulation		Pulsée	
Source		Nd : YAG	
Longueur d'onde		1064 nm	
Puissance de crête	1 kW	3 kW	3kW
Intensité max	5.000 W/cm ²	15.000 W/cm ²	15.000 W/cm ²
Energie / impulsion (max)	150 mJ	350 mJ	350 mJ
Puissance moyenne	6 W	10,5W	10,5W
Fluence	760 mJ/ cm ²	1780 mJ/ cm ²	1780 mJ/ cm ²
Durée de l'impulsion	< 150 µs	≤ 100 µs	≤ 100 µs
Dimensions et poids	38 x 22 x 42 cm; 13 Kg	30 x 70 x 78 cm; 40 kg	40 x 85 x 103 cm - 45 Kg
Alimentation	230V 50-60Hz 750 VA	230V 50-60Hz 1840VA	230V 50-60Hz 1840VA

TESLATHÉRAPIE



TALENT PRO
REMED

P.42



TALENT A
REMED

P.42





TESLATHÉRAPIE




TECHNOLOGIE PRINCIPE DE BASE

La Teslathérapie consiste à appliquer une impulsion magnétique sur une zone définie du corps. Contrairement à l'électrostimulation, le champ magnétique traverse facilement les vêtements, la peau, les couches de graisse et même les os : il lui est donc possible de pénétrer en profondeur dans une zone précise.

Caractéristiques

Confortable pour le praticien comme le patient, cette technologie a l'avantage d'être non-invasive, sans contact, rapide et intense. La stimulation électromagnétique permet de soulager les douleurs musculo-squelettiques. Au-delà des muscles, la pénétration du champ à plus de 10 cm de profondeur dans le corps permet un véritable travail de fond sur les cartilages et les os.

Celui-ci est rendu possible par l'action retour générée par la vibration créée par le champ magnétique pulsé.

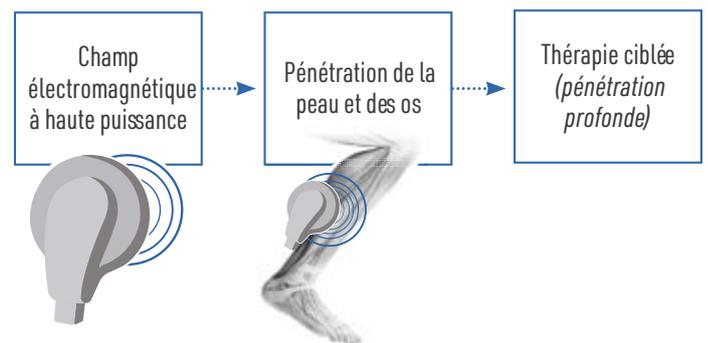


Indications :

- ▶ Douleurs chroniques et aiguës
- ▶ Relaxation musculaire
- ▶ Douleurs articulaires
- ▶ Douleurs cervicales
- ▶ Douleurs dorsales
- ▶ Sciatique
- ▶ Fractures
- ▶ Tendinopathie rotulienne
- ▶ Polyarthrite rhumatoïde
- ▶ Épaule gelée
- ▶ Régénération nerveuse
- ▶ Syndrome du canal carpien
- ▶ Troubles génito-urinaires
- ▶ Douleurs pelviennes
- ▶ Incontinence

Champs d'applications:

- ▶ Orthopédie
- ▶ Rééducation
- ▶ Génito-urologie

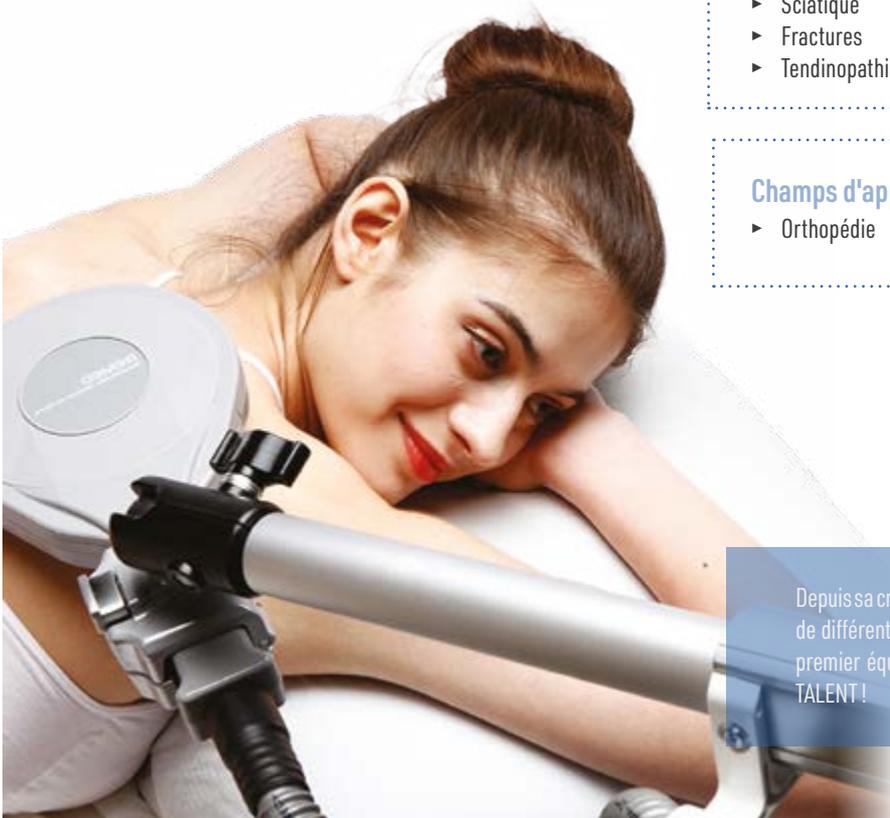

Depuis sa création en 2003, REMED prend soin des patients souffrant de différentes pathologies dans le monde entier en développant le premier équipement de stimulation électromagnétique : le SALUS TALENT !

TRAITEMENT SALUS TALENT



Durée du traitement :
1 à 60 min



➤ Préparation

Installer le patient confortablement et approcher le transducteur de la zone ciblée. Le patient n'a pas besoin de se dévêtir complètement.

➤ Lancement

Une fois le mode choisi, le praticien ajuste le niveau d'énergie de la force magnétique en fonction du patient.

➤ Application

Le transducteur est laissé sur la zone traitée durant le temps défini. Lorsque le traitement est terminé, l'appareil s'arrête automatiquement.



Incontinence urinaire & rééducation du plancher pelvien



5 MIN

SALUS TALENT offre une solution pérenne contre l'incontinence urinaire. Son champ électromagnétique pulsé permet une pénétration profonde dans les tissus ciblés du plancher pelvien et stimule les muscles qui contrôlent le flux d'urine. Ce traitement est non invasif et le patient reste entièrement vêtu.




Avant

Le plancher pelvien est affaibli. Ce manque de tonicité se traduit par des désagréments tels que l'incontinence urinaire.



Pendant

Le champ électromagnétique pulsé va traverser les tissus afin de les stimuler, tout comme vont l'être les muscles de la zone pelvienne.

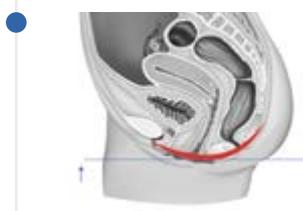

Après

Grâce à la stimulation électromagnétique pulsée, le plancher pelvien va retrouver de la tonicité et une meilleure tenue.



Traitement lésion articulaire aiguë et chronique



15 MIN

SALUS TALENT traite les douleurs aiguës et chroniques du système musculosquelettique et nerveux.

1. Avec une programmation spécifique, l'interaction entre le champ électromagnétique pulsé et le muscle entraîne une contraction musculaire souhaitée.
2. Grâce aux contractions répétitives des muscles entourant l'articulation, la libération du blocage de celle-ci est accélérée. La stimulation des articulations se fait via des contractions répétées des muscles entourant la capsule articulaire.
3. Ces contractions répétitives se substituent à leur sollicitation manuelle, ce qui conduit à la restauration articulaire.



TESLATHERAPIE

Salus Talent



LE POUVOIR DE LA STIMULATION
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

La puissance 3 TESLA, pour l'action en profondeur.

La technologie unique SALUS TALENT produit une énergie qui permet d'accélérer localement la cicatrisation des tissus. La conception ingénieuse du générateur de fréquence et du champ électromagnétique permet de le diffuser vers le patient grâce à un applicateur électriquement blindé. Son émission radiale stimule tous les tissus traversés par la pulsation. La profondeur est importante en raison de la composition efficace du signal. Avec un minimum de puissance, SALUS TALENT atteint des tissus en profondeur, tels que le plancher pelvien et bien d'autres réputés inatteignables.


Son système unique de refroidissement par huile lui confère une stabilité de puissance et d'énergie, y compris lorsque l'équipement est hautement sollicité.



NOUVEAU !

SALUS TALENT^{PRO} & SALUS TALENT^A

- ✓ Pratique & confortable
- ✓ Traitement avec le patient habillé
- ✓ Pénétration profonde dans la peau, les muscles et les os
- ✓ Non invasif
- ✓ Rapide & intensif

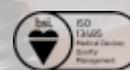

ÉTUDES SCIENTIFIQUES

SALUS TALENT est conçu pour optimiser la capacité d'auto-réparation naturelle du corps, ainsi que pour optimiser ses fonctions d'autorégulation. Ses avantages ont été démontrés par de nombreuses études scientifiques conduites à travers le monde. Les résultats obtenus prouvent l'efficacité de la perméabilisation des champs pulsés ainsi que de nettes améliorations dans les cas de fractures.

En 2003, la NASA a publié une étude* qui présentait les intérêts réels des champs électromagnétiques pulsés à une fréquence de 10Hz. Celle-ci démontre une accélération de la régénération des tissus biologiques entre 2,5 et 4 fois plus rapide qu'avec un traitement placebo.

D'autres études ont prouvé que la Teslathérapie soulage divers troubles de la colonne vertébrale et des articulations, quelle que soit leur phase (aigüe ou chronique), comme par exemple la lésion de la coiffe des rotateurs, la douleur dorsale et lombaire, le syndrome de conflit d'épaule, les lésions chroniques du tendon de la coiffe des rotateurs, mais aussi la réparation de tissus osseux, des fractures ou de l'ostéoporose. Enfin, sur les pathologies chroniques, la Teslathérapie réduit la douleur et restaure la mobilité des articulations.



*Les actions des champs électromagnétiques pulsés sur les cellules neuronales du corps humains. Thomas J. Goodwin, Ph.D. Lyndon B. Johnson Space Center - 2003

TABLEAU COMPARATIF



	SALUS TALENT PRO	SALUS TALENT A
Puissance magnétique	3 Tesla	3 Tesla
Canal	2Ch	x
Fréquence magnétique	1-100 Hz	1-100 Hz
Protocoles de traitements	20 modes auto - 20 modes utilisateur - 20 modes manuel	9 modes auto - 9 modes utilisateur
Temps de traitements	1 à 60 minutes	1 à 60 minutes
Transducteur	2 têtes de traitement	1 tête de traitement
Dimensions // poids	45x60x110cm // 60kg	46x52,6x98cm // 30kg

PRESSOTHÉRAPIE



GMOVE SUIT
WINBACK

P.48



PULSE RECOVERY 2.0
NORMATEC

P.50



6XPRESSO
WINBACK

P.52





“

Boostez votre efficacité avec une solution de pressothérapie permettant de répondre rapidement aux troubles circulatoires.

GMOVE-SUIT



TECHNOLOGIE PRINCIPE DE BASE

La GMOVE-SUIT est une révolution dans le domaine de la compression active. Elle permet notamment quatre utilisations en un seul produit : outre la possibilité de l'utiliser comme on utiliserait un appareil de compression classique de manière statique, GMOVE-SUIT rend aussi possible la récupération active, le renforcement musculaire ainsi qu'un travail en OV (Occlusion Vasculaire), aussi appelé méthode KAATSU.

Toute contrainte a été éliminée, grâce à son faible encombrement, sa légèreté et son autonomie, GMOVE-SUIT va vous suivre partout lors de vos déplacements et dépasse les niveaux d'exploitation de la compression actuelle.

Indications :

- ▶ Récupération fonctionnelle et post-opératoire
- ▶ Résorption des œdèmes et des hématomes
- ▶ Insuffisance veineuse ou lymphatique
- ▶ Récupération musculaire

Effets :

- ▶ Récupération et soulagement
- ▶ Diminution de la sensation de jambes lourdes
- ▶ Amélioration des performances



ROBUSTE

L'athlète ne subit pas de restriction dans son utilisation de la compression, quels que soient l'activité ou le contexte.



MINISIZE

Pesant 750 g, transportable dans une valise deux fois plus petite que ses concurrentes et adaptée aux déplacements du quotidien.



BATTERIE

Son autonomie de deux heures en traitement et sa recharge rapide permettent d'exploiter pleinement ses capacités.



PUISSANTE

GMOVE-SUIT offre une plage de 30 à 120 mmHg de pression, ce qui fait d'elle la compression mobile la plus puissante du marché.




GAIN DE TEMPS

Votre temps est précieux. Grâce à sa mobilité, vous n'aurez plus à stopper vos activités pour bénéficier d'une séance.



MOBILITÉ

Utilisée en mouvement, elle se marie efficacement avec vos activités et offre des avantages jusqu'alors inexploités.

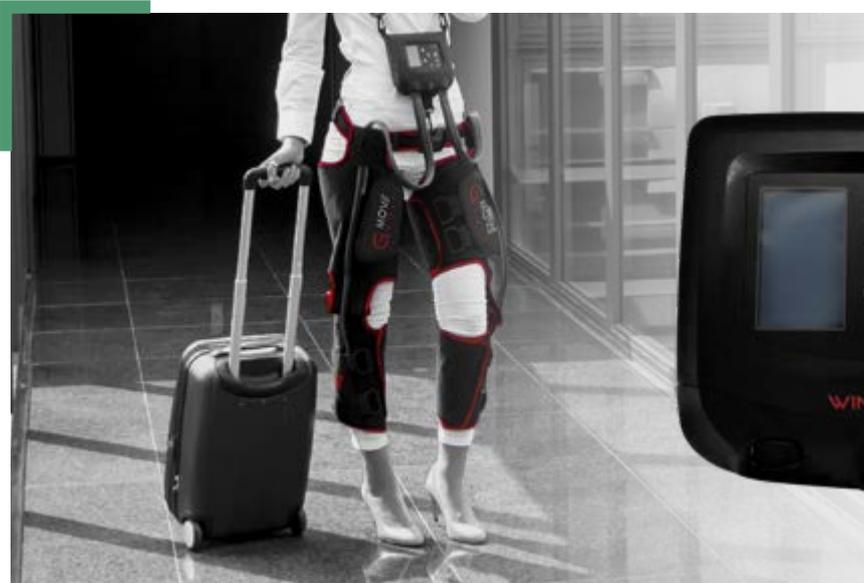

2h d'autonomie

750g seulement

120mmHg de pression max

3 Programmes

0 GRAVITÉ

Grâce à sa flexibilité et son autonomie, GMOVE-SUIT est utilisée en fin de séance pour une session de décrassage ou d'étirements, afin de mieux préparer à l'enchaînement d'entraînements. Avec son équipement GMOVE-SUIT, l'athlète vaque à ses occupations, y compris mobiles (marche, conduite, voyage en avion,...) ou travaille assis afin de favoriser l'élimination des toxines et le retour veineux, tout en ne perdant pas de temps.



2G - ACTIVE



ACTIVE prône la mobilité à la suite d'un effort physique intense, à travers un décrassage des toxines par un entraînement physique modéré (à 50-60% de l'effort max.).

Cette technique, aussi appelée récupération active, réduit plus rapidement la concentration plasmique de lactate que la récupération passive et permet également de réduire fortement les courbatures douloureuses au surlendemain de l'effort.

4G - BOOST

La fonction BOOST réduit fortement l'apport en oxygène afin d'augmenter l'activité musculaire en utilisant peu de charge. GMOVE-SUIT est utilisé à 120mmHg afin de compresser pendant une minute les deux jambes. S'en suit une récupération active d'une minute (fonction active), où l'athlète doit rester en mouvement mais à 40% de son effort.




NORMATEC

NORMATEC accompagne de nombreux sportifs et clubs professionnels grâce à leur protocole de récupération musculaire spécifique breveté et leur recherche de performance au quotidien. En effet la technologie NORMATEC propose un programme spécifique au sport et au rétablissement plus rapide des sportifs.

Que ce soit pour le running, l'escalade, le football ou la préparation physique, utiliser le système de drainage lymphatique NormaTec après une séance d'entraînement intense permet une récupération active des tissus ainsi qu'une réduction considérable de la douleur et des tensions.

LE TRAITEMENT NORMATEC

COMPRESSION DYNAMIQUE ET GRADUELLE DES CHAMBRES

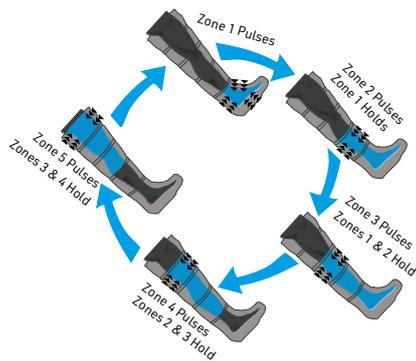

- 1 Programmes
- 5 Chambres
- Ultra léger
- 2h d'autonomie
- Transportable

NOUVEAU ! NORMATEC PULSE 2.0

- ✓ Appli. mobile connectée
- ✓ 27% plus petit
- ✓ Plus résistant
- ✓ Technologie brevetée
- ✓ Simple d'utilisation
- ✓ Zone boost pour cibler le traitement sur une zone
- ✓ Récupération rapide

APPLICATIONS :

- ▶ Récupération après une séance de sport
- ▶ Récupération musculaire



TECHNOLOGIE

PRINCIPE DE BASE

La pressothérapie est un outil permettant d'effectuer un travail sur les circuits veineux et lymphatiques, qui vient généralement en complément du drainage lymphatique manuel. Les vertus drainantes sont également appréciées en complément de soins esthétiques.

L'action se définit par un mouvement de compression et décompression à un rythme donné sur les tissus ciblés.

Cette technologie va permettre de travailler en surface et en profondeur grâce aux différentes pressions utilisables. (0 à 200 millimètre de Mercure, mmhg)



La pressothérapie favorise le drainage lymphatique en utilisant la pression de l'air sur différentes parties du corps. En alternant compression et décompression, elle stimule efficacement le système lymphatique et circulatoire afin de résorber les excès de fluide (*type œdèmes, rétention d'eau, ...*). Elle permet aussi d'améliorer les échanges, d'éliminer les toxines, stimule également le système immunitaire, renforce les défenses contre les agents pathogènes et contribue à faire baisser la tension artérielle si le patient souffre d'hypertension.

La pressothérapie peut par ailleurs aider avec des problèmes digestifs. Lorsque le traitement est appliqué sur l'abdomen, il stimule le transit intestinal et soulage les problèmes de constipation.

Les athlètes d'élite l'utilisent également pour améliorer leur forme physique. C'est le complément idéal pour tonifier les muscles et les articulations, mais elle détend également les muscles, réduit la fatigue musculaire et prévient douleur et crampes.

Indications :

- ▶ Drainage lymphatique
- ▶ lymphœdème
- ▶ Insuffisance veineuse
- ▶ œdèmes post-opératoire
- ▶ syndrome post-phlébitique
- ▶ Cicatrices hypertrophiques
- ▶ Récupération musculaire
- ▶ Syndrome post-thrombotique
- ▶ Troubles thrombotiques
- ▶ lymphœdèmes congénitaux et acquis
- ▶ Oedèmes veino-lymphatiques
- ▶ Traitements appel-résorption
- ▶ Rééducation fonctionnelle et postopératoire
- ▶ Résorption des oedèmes et des hématomes
- ▶ Insuffisances veineuses ou lymphatiques
- ▶ Récupération musculaire

Contre-indications :

- ▶ Ulcère de jambe
- ▶ Artérite des membres inférieurs graves
- ▶ Insuffisance cardiaque congestive
- ▶ Gangrène
- ▶ Thrombose veineuse profonde
- ▶ Insensibilité à la douleur
- ▶ Blessures infectées et non traitées
- ▶ Greffe cutanée récente
- ▶ Dermatite
- ▶ Grossesse
- ▶ Syndrome post-thrombotique

LES MODES DE COMPRESSION - 6XPRESSO & DL1200

DEUX MODES DE COMPRESSION POSSIBLE :

1 Compression séquentielle :

Compression et décompression successive cellule par cellule.
Plus adapté au travail sur les circuits lymphatiques.



2 Compression continue :

Compression successive de chaque cellule l'une après l'autre.
Plus adapté sur les circuits veineux.



+ Mode Reverse :

Pour un appel à résorption en activant les cellules du haut vers le bas.



6XPRESSO

Appareil idéal en complément du drainage lymphatique manuel. Il a été conçu pour effectuer des séances thérapeutiques personnalisées et traiter ainsi les pathologies liées à une insuffisance de la circulation sanguine.


APPLICATIONS :

- ▶ RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE
- ▶ RÉÉDUCATION



3 Programmes

6 Chambres

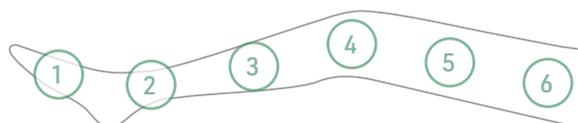

DL1200

L'appareil de drainage lymphatique et vasculaire DL1200 Doctor Life est destiné à un usage professionnel. Il propose des possibilités de réglages infinies :

- > Réglage de la pression par cellule
- > Réglage des temps de pauses et de la vitesse de compression
- > Avec ses 12 cellules il offre une précision et un confort de drainage optimal.
- > Il est proposé 8 programmes visant l'assistance veineuse, le drainage et le traitement global ou insistance localisée.



8 Programmes

12 Chambres

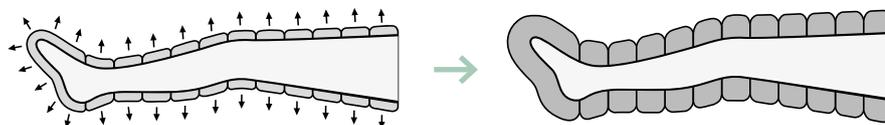


TABLEAU COMPARATIF



	NORMATEC PULSE 2.0	GMOVE SUIT	6XPRESSO	DL1200
MM/Hg	De 0 à 110 mmHg	120 mm/hg max	De 20 à 200 mm/hg	De 0 à 200 mm/hg
Accessoires inclus	2 Bottes	2 Bottes	2 Bottes + manchon de bras	2 Bottes recouvrant la hanche
Accessoires en options	Panty, manchon, sac de transport	x	ceinture	Manchon
Temps de traitements	X	Jusqu'à 60 minutes	Jusqu'à 99 minutes	Jusqu'à 60 minutes
Transports	Portable	Portable	X	X
Autres infos	X	Mobile, home care ou professionnel Léger et silencieux	Possibilité de supprimer 1 ou plusieurs cellules	Réglage de pression par cellule ou pression nulle, utilisation de plusieurs accessoires simultanément

UNIVERS LED

REAX BOXE / REAX LIGHTS P.58

REAXSTATION COMPACT P.59

UNIVERS INSTABILITÉ

FLUIBALL P.60

REAX FLUILIFT P.61

REAXBOARD P.62

REAXRUN P.64





REAXING

TRAIN TO REACT

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE


Au quotidien nous recevons des informations de nos sens, puis notre système nerveux central les intègre. Les appareils Reaxing permettent de reproduire cette imprévisibilité et de travailler selon une approche

neuromusculaire, à travers deux univers, l'un axé autour du déséquilibre et l'autre autour des LED. Le concept de Reaxing tire ses racines de l'idée que chaque jour nous sommes exposés à des situations imprévisibles. La capacité de

réagir est la pierre angulaire de notre bien-être psychophysique. Lorsque quelque chose d'inattendu se produit, nous réagissons avec notre corps et notre esprit. Ces deux entités sont strictement connectées.

UNIVERS LED

TRAITEMENT EN TEMPS RÉEL

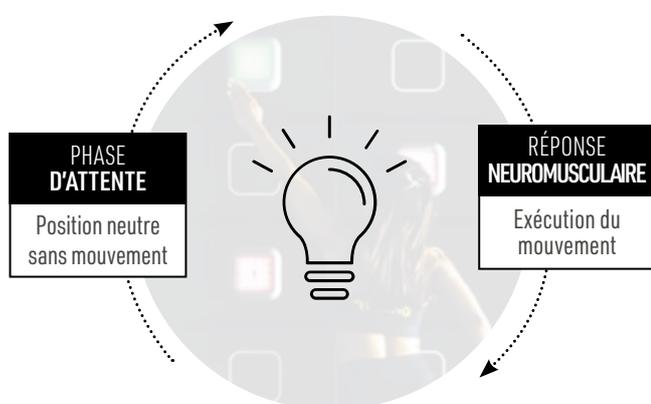

STIMULATION « LED »

travail sur de la reprogrammation neuromusculaire de manière ludique ainsi qu'un travail de renforcement musculaire.

Ici, c'est la tête qui commande. Permet la reprogrammation neuromusculaire en s'amusant, par exemple en rééducation post-opératoire, ainsi qu'un travail de renforcement musculaire.



Durée d'une séance : environ 20 minutes

REAXING - REAX BOXE

Le **REAX BOXE** combine la philosophie REAXING avec le sac de boxe. La technologie dirigée par REAX LIGHTS est intégrée à la REAX BOXE pour améliorer la réactivité, la vitesse, la fonction cognitive et les capacités cardiovasculaires. Les six couleurs disponibles dans les 24 zones prédéfinies du sac permettent à des patients ou à de petits groupes de 3 à 6 personnes d'effectuer différents exercices.

- Plusieurs programmes : boxe, kick boxing
- Différents niveaux de difficulté pour impliquer davantage le système neuro-cognitif
- Plusieurs utilisateurs en simultané ou consécutivement (une couleur par personne pour plus de réactivité)



REAXING REAX LIGHTS

Avec les **REAX LIGHTS**, chaque exercice devient plus ludique, permettant au patient une nouvelle expérience de motricité tout en stimulant son **agilité** et sa **proprioception**. Le principe est simple : le patient doit toucher la LED qui s'allume le plus rapidement possible, la couleur de la LED déterminant quelle main doit être utilisée et quel mouvement doit être effectué.



- Peuvent être combinées avec d'autres outils fonctionnels pour plus d'interactivité et d'imprévisibilité
- Amélioration de la vitesse, du temps de réaction, de la coordination
- Temps de rééducation fonctionnelle réduit
- Pack de 6 ou 12 LED

REAXING

REAXSTATION COMPACT

Le **REAXSTATION COMPACT** combine la philosophie de travail neuromusculaire prônée par REAXING et les besoins des cabinets de kinésithérapie : des stations prêtes à l'emploi où les utilisateurs sont guidés pour travailler de manière **autonome**, de manière originale, amusante et fonctionnelle.




▶ ENTRAÎNEMENTS COGNITIFS

Les couleurs de lumière correspondent à des mouvements spécifiques. La réactivité et la capacité de prendre des décisions dans les plus brefs délais sont améliorées

▶ ENTRAÎNEMENTS À LA RÉACTIVITÉ

Les couleurs de lumière incitent le patient à améliorer sa réactivité réelle tout en impliquant des bandes musculaires spécifiques

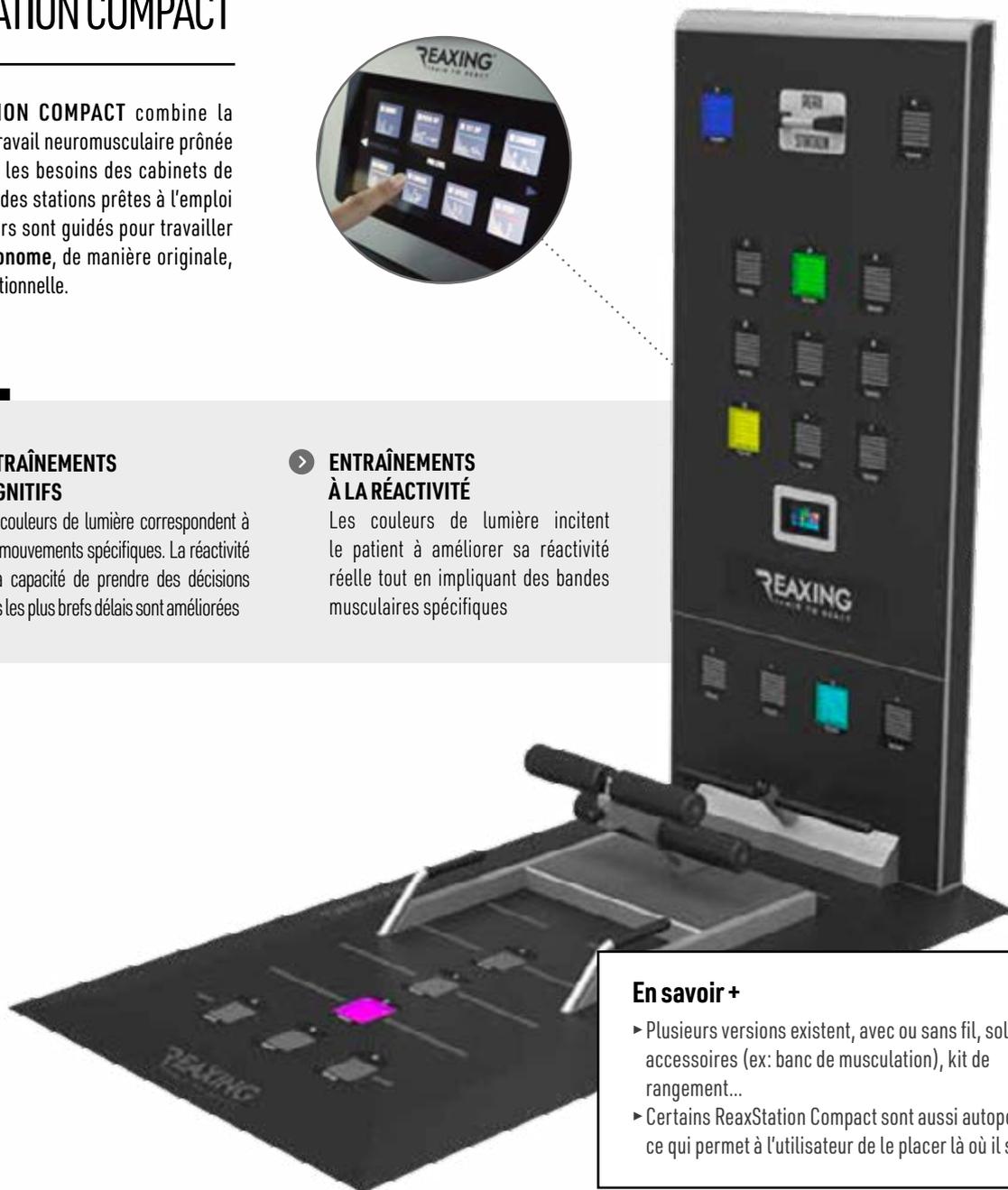


En savoir +

- ▶ Plusieurs versions existent, avec ou sans fil, sol, accessoires (ex: banc de musculation), kit de rangement...
- ▶ Certains ReaxStation Compact sont aussi autoportants, ce qui permet à l'utilisateur de le placer là où il souhaite.



UNIVERS INSTABILITÉ

TRAITEMENT EN TEMPS RÉEL

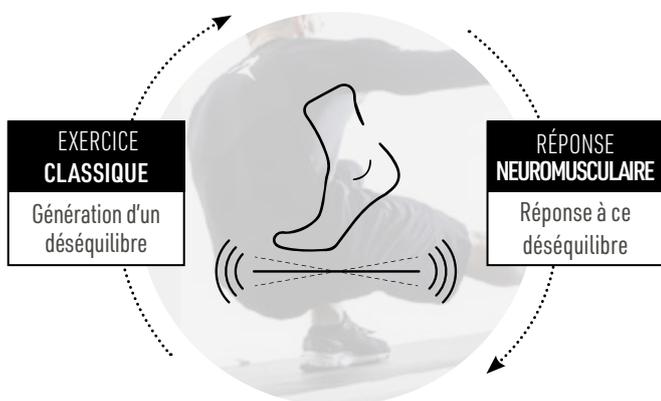

STIMULATION

« INSTABILITÉ »

travail de proprioception et sur les muscles profonds.

Indications :

Board/Run : destiné aux personnes ayant des problèmes sur ce point, âgées ou en rééducation. Permet de travailler sur la reprogrammation neuromusculaire ou sur du renforcement. Utilisée en post-traumato, elle permet d'être plutôt dans le réflexe.



Durée d'une séance : environ 20 minutes

REAXING - FLUIBALL

BREVET DÉPOSÉ



FLUIBALL est une médecine-ball **incassable** et tactique, avec une quantité variable d'eau colorée (non-toxique). L'**instabilité** et l'**imprévisibilité** de l'eau en font un outil vraiment fonctionnel. Les différents poids et diamètres disponibles les rendent **polyvalents** et permettent à l'utilisateur de personnaliser ses programmes d'entraînement destinés à toutes les parties du corps.



PLUSIEURS POIDS
(de 0,5 kg à 12 kg)



PLUSIEURS DIAMÈTRES
(de Ø 16cm à Ø 65cm)

- **Aucun risque de dommages aux personnes ou surfaces.**
- **Adapté à la rééducation, chaque mouvement peut être contrôlé afin d'améliorer la force, l'équilibre et la coordination**
- **La technologie du « soft shock » donne au FLUIBALL une douceur extrême et une sensation unique, l'utilisateur améliore à la fois ses exercices traditionnels et ceux plus dynamiques et affûtés.**



REAXING - REAX FLUILIFT

Symétrie, stabilité et cohérence caractérisaient jusqu'alors le port de poids dans la majorité des entraînements.

La barre **REAX FLUILIFT** inverse la donne, plusieurs assemblages / configurations possibles & plusieurs gammes de poids et de barres.



- Le poids à porter devient instable, de manière inattendue
- Meilleur travail sur la proprioception ainsi que sur le travail de renforcement des muscles profonds
- Améliore la coordination



LA MÉTHODE D'ENTRAÎNEMENT

REAXING est l'association d'un équipement à la pointe de la technologie et d'une méthode d'entraînement basée sur le procédé « d'impulsion dynamique soudaine ». L'imprévisibilité exacerbe les sens et pousse l'entraînement à un niveau supérieur tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Dès lors l'activité métabolique, le temps de réaction et la vitesse de récupération post-traumatique sont améliorés.

REAXING - REAXBOARD

REAX BOARD est une surface intelligente qui peut simuler et générer des impulsions soudaines pendant la séance.



- Approche cognitive et neuromusculaire innovante
- Combinaisons et possibilités d'exercice infinies, imprévisibles, plus efficaces et amusants
- Tous les muscles sont stimulés
- Concentration constante et élevée
- Plusieurs programmes et niveaux

*NOUVELLE EXPÉRIENCE DE MOUVEMENT,
AMÉLIORE L'ÉQUILIBRE, LA PROPRIOCEPTION ET
STIMULE L'EFFICACITÉ NEUROMUSCULAIRE,
TOUT EN CONSOMMANT DES CALORIES.*




APPLICATION

La tablette sans fil est contrôlée par une application dédiée, disponible pour les versions iOS et Android. L'interface permet une aisance dans la navigation et offre un large choix de programmes. Exemple de programme kinés : la fonction live qui permet le contrôle en temps réel. Chaque aspect sécuritaire a été examiné dans les moindres détails.



REAXING

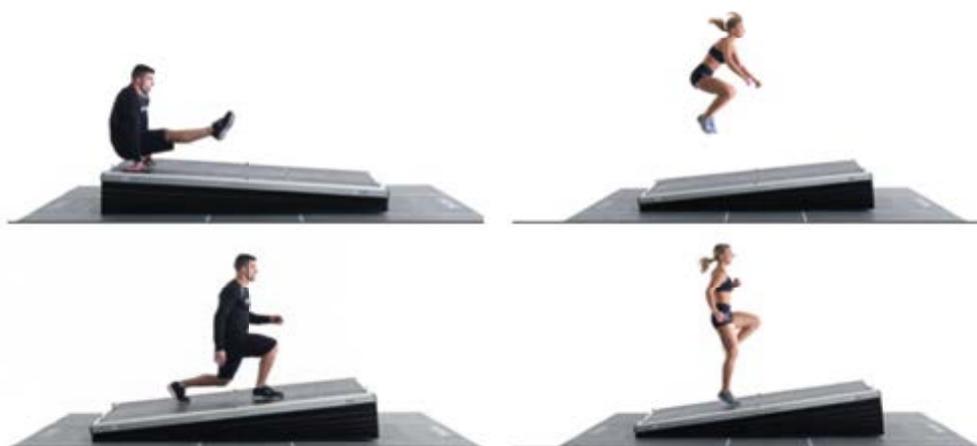

En savoir +

- ▶ Existe en version mini (125x125x33)
- ▶ Tablette ou station de contrôle nécessaire
- ▶ Possibilité de combiner son utilisation avec celle d'autres équipements Reaxing

Caractéristiques :

- ▶ Longueur : 250 cm
- ▶ Largeur : 125 cm
- ▶ Hauteur : 33 cm
- ▶ Poids : 440 kg

REAXING - REAX RUN

Reax Run est le seul tapis roulant au monde capable de simuler une expérience de déplacement irrégulier. L'inclinaison du tapis varie de manière **inattendue** dans toutes les directions. Le mouvement **imprévisible** oblige l'athlète à se concentrer, rendant l'activité neuro-cérébrale plus intense. Au quotidien, nous évoluons sur des surfaces inégales et dans des conditions imprévisibles auxquelles notre corps et notre esprit ne sont pas toujours entraînés pour réagir promptement.



REAX RUN APP

Grâce à son interface intuitive, n'importe quel utilisateur est capable de lancer le programme d'entraînement souhaité.

- ▶ 16 programmes disponibles
- ▶ Le praticien peut créer un nombre illimité de programmes personnalisés mais aussi modifier l'exercice en direct

**LE SEUL AU MONDE
CAPABLE DE SIMULER UNE
EXPÉRIENCE DE COURSE HORS ROUTE**

BREVET DÉPOSÉ 

AMÉLIORE LES COMPÉTENCES MOTRICES

Le tapis permet un travail proprioceptif inédit et une action profonde sur les muscles stabilisateurs grâce à la marche ou la course sur le tapis. Les groupes musculaires généralement sollicités sont activés tout comme les muscles stabilisateurs des membres inférieurs. La position varie fréquemment en fonction des **variations soudaines**. Cela favorise le renforcement des articulations ainsi que l'amélioration de l'équilibre, tout en augmentant la coordination et la proprioception. Comparé à un tapis roulant traditionnel, sur un même temps d'utilisation, il garantit de **meilleurs résultats**.



INCLINAISON LATÉRALE de +/- 14%

Pour reproduire des sentiers hors route



AUGMENTER L'ACTIVITÉ CÉRÉBRALE

Le mouvement imprévisible de la course Reax (technologie 3D Movement) oblige à se concentrer constamment afin de réagir aux changements d'orientation du tapis. En conséquence, **l'activité neuro cérébrale est plus intense.**

AUGMENTER L'ACTIVITÉ MÉTABOLIQUE

Idéal pour une activité de haute intensité. Comparé à un tapis roulant traditionnel, dans un même intervalle de temps, l'instabilité et l'imprévisibilité, assurent une **activité métabolique beaucoup plus élevée.** Il est donc particulièrement adapté aux programmes ou circuits dédiés à la perte de poids.

Caractéristiques :

- ▶ 0,1 à 25 km/h : pour choisir le rythme idéal
- ▶ Largeur du tapis : 73 cm, pour un espace de course confortable
- ▶ Ecran tactile de 15 pouces, avec une interface utilisateur simple et intuitive
- ▶ Inclinaison frontale de +/- 11% et latérale de +/- 14 %, pour un déclenchement de déséquilibre rapide et inattendu permettant de travailler sur ces points là.
- ▶ Style, sécurité et innovation sont réunis dans un seul produit 100% made in Italy




INCLINAISON FRONTALE de +/- 11%
Pour course difficile en montée / en descente

3D
MOTION
TECHNO
LOGY

REAXING - REAX STATION

REAX LIGHTS STATION est un espace dédié conçu pour être adapté à votre espace professionnel.

L'objectif est d'amplifier vos séances de travail avec des lumières REAX. Chaque lumière, par son positionnement mais aussi sa couleur, indique le mouvement à effectuer pour la toucher, à la fois face au patient mais également au sol. Cet espace permet un travail de rééducation varié ainsi qu'un entraînement de haute qualité pour les sportifs.

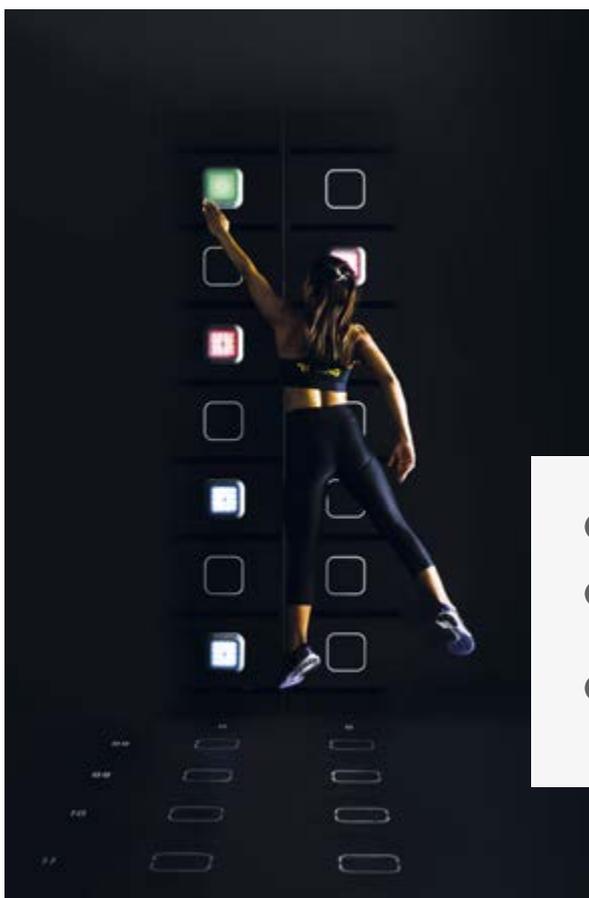

- Permet d'améliorer la réactivité et l'agilité
- Très simple de prise en main et d'utilisation, tant pour le praticien que pour le patient
- Large panel de programme et de modes d'entraînement pouvant s'adapter à tous les types d'utilisateurs

“ TRAVAIL SUR
LA VITESSE ET L'AGILITÉ

REAX STATION

LES LUMIÈRES INTELLIGENTES

Dynamique, ludique et adaptée à tout type de patient. Suivant le principe des Reax Lights, chaque exercice avec la Reax Station devient interactif, améliorant la rapidité dans l'exécution des mouvements tout en appuyant sur un travail neuromusculaire lié à l'imprévisibilité et la réactivité. C'est un incroyable outil Wi-Fi, à la fois polyvalent et facile d'utilisation. Vous pouvez contrôler les lumières, choisir la difficulté et le programme de la séance depuis l'application.

Ce pack comprend :

- REAX WALL STATION - EXECUTIVE avec le chargeur
- REAX FLOOR 375/330 - 7 mm
- REAX LIGHTS 12 PACK WF - STUDIO
- ÉCRAN TACTILE 10"
- latérale de +/- 14 %, pour un déclenchement de déséquilibre rapide et inattendu permettant de travailler sur ces points là.





DOUBLE POULIE KINE MI6

Unique et élégant, le multigym MI6 permet de travailler tous les groupes musculaires avec **plus de 60 exercices différents.**

- > Zone de travail illimitée
- > Multipatients
- > Poulies réglables et orientables à 360°



UN CORPS CORRECTEMENT ÉQUILIBRÉ ET DÉVELOPPÉ

Accessoires :



Dôme d'exercice



Ballon



Tapis de sol



Elastiband



Suspension trainer



Banc réglable en option

« Grâce à son faible encombrement et à sa grande polyvalence, je peux travailler en chaîne cinétique ouverte ou fermée, en statique, concentrique ou excentrique sous maximal. Du pur bonheur ! Et la possibilité au quotidien de concevoir de nouveaux exercices adaptés à la pathologie et au stade de récupération de mes patients. »

Jérôme Piquet - Kinésithérapeute, formateur en kiné du sport et responsable pédagogique de Kiné Santé Sport Atlantique Nantes - Bordeaux

Application :

- ▶ Membres Inf / Sup - Dos / Tronc
- ▶ Renforcement - Prévention - Mobilisation

POWER PLATE



TECHNOLOGIE PRINCIPE DE BASE

La Power Plate fonctionne sur un principe d'accélération en trois dimensions. Le plateau vibre de haut en bas, de droite à gauche et d'avant en arrière. Ces accélérations provoquent des contractions musculaires réflexes, à la fois rapides et intenses. L'ensemble des muscles se contractent 30 fois par seconde, soit 1800 fois par minute.

Cette stimulation réflexe unique permet de solliciter les muscles à 97% de leurs capacités contre seulement 30% lors d'un entraînement traditionnel avec contraction volontaire.

Un entraînement 3 fois plus efficace qu'un entraînement traditionnel !

Applications :

- ▶ Remise en forme
- ▶ Renforcement musculaire
- ▶ Préparation sportive
- ▶ Amincissement
- ▶ Rééducation
- ▶ Étirements
- ▶ Massage

Zoom sur la thérapeutique :

- ▶ Sclérose en plaques
- ▶ Parkinson
- ▶ Entorses
- ▶ Lombalgie
- ▶ Syndrome rotulien
- ▶ Abdos post partum



**UNE SALLE DE SPORT
COMPLÈTE SUR 1M²**

TRAITEMENT POWER PLATE® - EFFICACITÉ THÉRAPEUTHIQUE



Les bénéfices de la plateforme vibrante sont reconnus dans les domaines de la beauté, de l'amaigrissement, de la remise en forme, de la rééducation, de l'accompagnement des seniors et plus généralement de la santé.

- Réduction de l'aspect cellulite
- Perte de poids
- Force et puissance musculaire
- Augmentation de la Circulation et amélioration des fonctions cardiovasculaires
- Souplesse et amplitude de mouvement améliorées
- Bien-être et qualité de vie
- Soulagement de la douleur & rééducation
- Prévention de l'ostéoporose
- Prévention des chutes

POWER PLATE MOVE

Elle est programmable jusqu'à 9 minutes en continu, vous permettant ainsi de vous entraîner sans avoir à relancer la machine pendant les exercices.

La télécommande permet aussi de gagner en liberté, quelle que soit votre position de travail (y compris pendant les massages, vous pouvez ajuster le temps, l'intensité et la fréquence, d'un simple appui).

Le grand plateau permet de réaliser aisément de nombreux exercices (fentes, massages, étirements, gainage).

De plus, l'endurance importante de la machine lui permet d'être utilisée par les professionnels plusieurs heures par jour.


La Power Plate Move est équipée de la technologie Precision Wave™ (unique et brevetée) qui fait de Power Plate, le leader mondial et incontesté des plateformes vibrantes depuis plus de 15 ans.

Cette efficacité permet d'obtenir des résultats rapides et durables en un minimum de temps (vous pouvez effectuer un entraînement complet en moins de 15 minutes chez vous).


Le temps de récupération est également réduit sur Power Plate (étirements, massages). La power plate Move devient ainsi un véritable allié de votre forme au quotidien.




“ PLATEAU **+12% PLUS GRAND**
QU'UNE MY5 ET **+35% PLUS GRAND**
QU'UNE COMPACTE

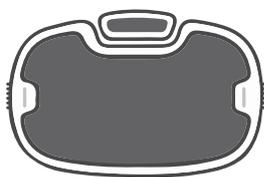

Power Plate Compact

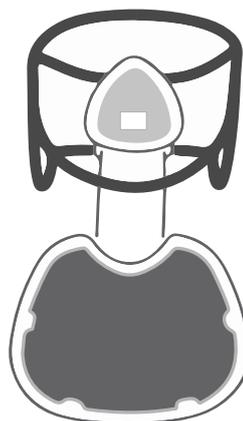

Power Plate My5

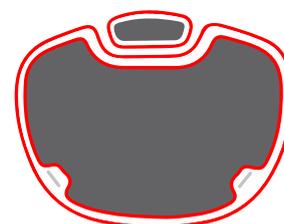

Power Plate MOVE

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Gris argent
Dimensions	77 cm x 61 cm x 23 cm
Poids	39 kg
Programmation	Jusqu'à 9 minutes sans interruption
Amplitude	High ou Low
Fréquence	30-35-40 hz
Charge maximale supportée	136 kg
Alimentation	Prise secteur 220v
Garantie	2 ans

SWIMS.STORE

SHOCKTHÉRAPIE MASSAGE PAR PERCUSSION

Activation et stimulation musculaire, soulagement des douleurs et courbatures, passez le niveau supérieur en préparation et récupération !

NOUVEAU !
+ 50% silencieux
+ 60% d'autonomie

G3PRO

THERAGUN

- 01 PUISSANCE & PROFONDEUR**
Une percussion de l'ordre de 40 impulsions par sec. pour une récupération musculaire et un soulagement
- 02 SÉANCE RÉGULIÈRE**
Permet d'évacuer ce qui est utile pour le soulagement à court terme des douleurs musculaires aiguës.
- 03 ACTIVATION & STIMULATION**
Une activation quasi-instantanée pour un soulagement des douleurs et des courbatures



Contenu du pack :


- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. THERAGUN G3PRO | 6. Amortisseur |
| 2. Valise de transport | 7. Boule large |
| 3. Pochette de fixation | 8. Boule standard |
| 4. Deux batteries | 9. Coin |
| 5. Chargeur batterie | 10. Pouce |
| | 11. Cône |

Caractéristiques :

- ▶ Fréquence : 1750 & 2400 RPMs
- ▶ Poids : 1,3 kg (stabilité optimale)
- ▶ Dimensions : 257 mm x 205 mm x 68 mm
- ▶ Batterie (x2) : LithiumTech (75mn d'autonomie)
- ▶ Témoin de charge de la batterie
- ▶ Bras rotatif 4 angles
- ▶ 6 embouts interchangeables
- ▶ 2 vitesses

SWIMS .store

100%
KINÉ DU SPORT

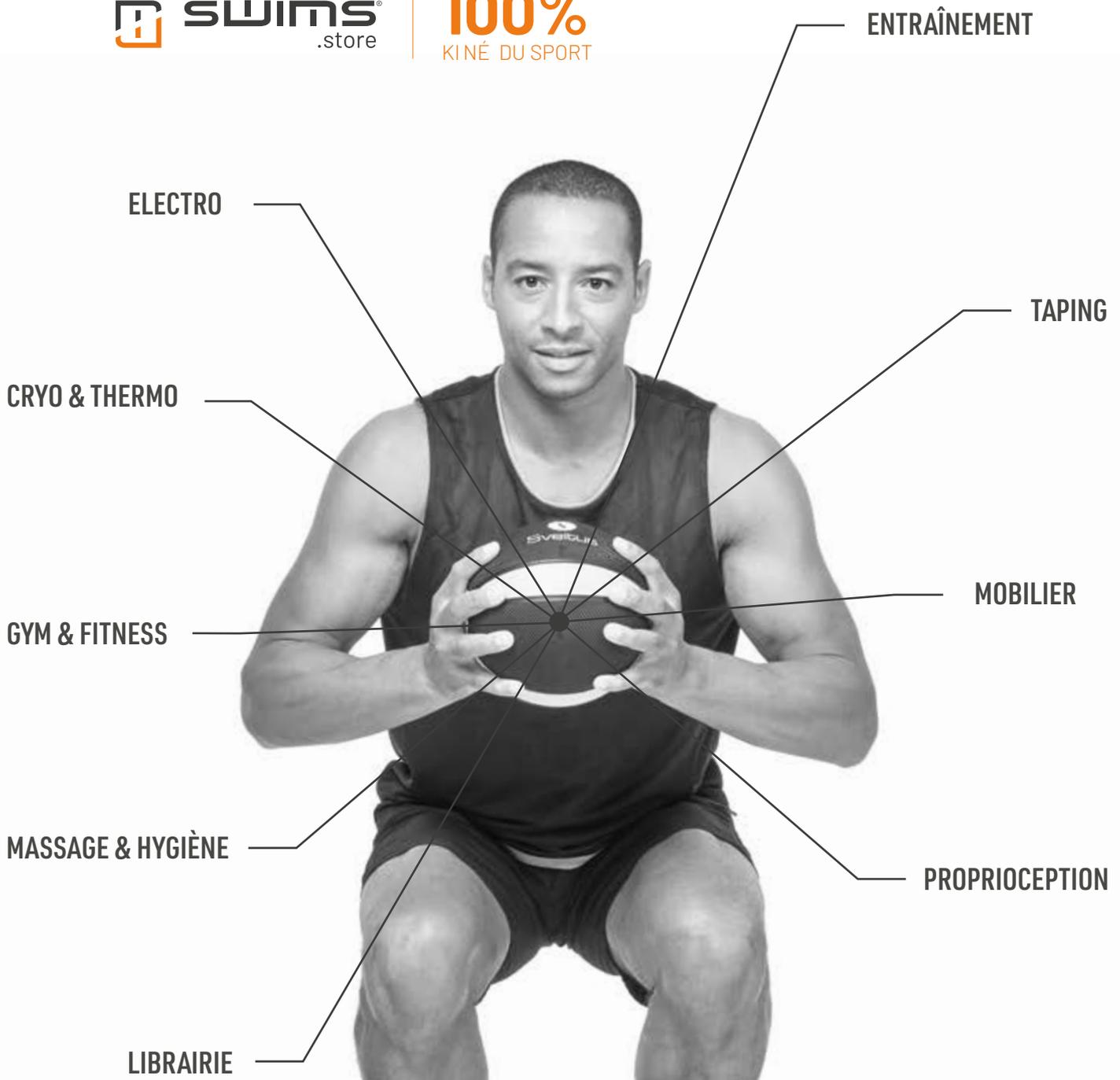

ANYCARE

Appareil compact et portable, il peut être utilisé à domicile ou chez les professionnels de santé.

Grâce à son modèle unique d'alternance entre pression et décompression, ANYCARE favorise une meilleure circulation sanguine et l'élimination des toxines.

Il peut être utilisé aussi bien pour la récupération sportive que pour lutter contre la rétention d'eau et la cellulite aqueuse.



1

Programme

4

Chambres

LX7

2

Programmes

4

Chambres

L'appareil de pressothérapie LX7 réactive la circulation du sang dans les circuits lymphatiques et vasculaires. Il permet ainsi d'éliminer les toxines et de soulager les sensations de jambes lourdes de manière plus efficace que le drainage manuel.

+

PRATIQUE :

LORS DE VOTRE TRAITEMENT, POUR S'ADAPTER AU MIEUX À VOTRE BESOIN, VOUS POUVEZ METTRE UNE PRESSION NULLE SUR UNE OU PLUSIEURS CELLULES.

Effets :

- ▶ Augmentation du flux veineux et du flux lymphatique
- ▶ Diminution de la sensation de jambes lourdes
- ▶ Accélération de la résorption des liquides, limitant la rétention d'eau
- ▶ Élimination des déchets et des toxines
- ▶ Diminution des œdèmes
- ▶ Effet relaxant
- ▶ Affinement de la silhouette
- ▶ Raffermissement des tissus endommagés




KYNETT

POULIE MOBILE



Grâce à sa conception astucieuse, sa valise maniable et son poids de seulement 5 kg, le Kynett est facile à transporter. Que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, à la maison, à la salle de gym ou en déplacement, l'entraînement est possible n'importe où.

- Poulie de renforcement musculaire simple et efficace
- Facile à transporter, utilisable n'importe où
- Se fixe à un mur ou à un poteau
- Plusieurs gammes de résistance grâce aux disques d'inertie
- Une multitude d'exercices

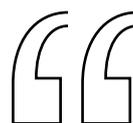

DE LA RÉSISTANCE MINIMALE
À LA PLEINE CHARGE



ENTRAÎNEMENT
CINÉTIQUE



COMMENT ÇA MARCHE ?

L'exercice avec Flywheel est un développement unique dans la physiothérapie. Au lieu des poids traditionnels, il se fait avec un disque rotatif.

Ce type d'exercice s'appelle un entraînement cinétique. Dans la phase concentrique, il démarre et accélère grâce à la traction d'une sangle. Si la sangle est complètement déroulée, il y a tellement d'énergie cinétique stockée qu'elle se rembobine de manière automatique. Le but est de mettre le disque à l'arrêt et de recommencer avec un mouvement concentrique.




WWW.SWIMS. STORE

Toutes nos gammes de produits sont disponibles à la vente directement sur notre site internet dédié



UNE OFFRE ORIENTÉE

SWIMS.STORE propose plus d'une centaine de références produits pour répondre aux besoins des professionnels de la rééducation et plus particulièrement aux kinés du sport.

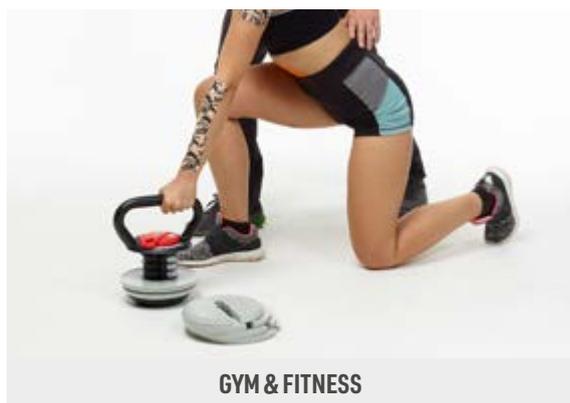

GYM & FITNESS



TAPING - DOKI



PROPRIOCEPTION



MOBILIER



ENTRAÎNEMENT



DIAGNOSTIC & MESURE



ELECTROTHÉRAPIE



RÉCUPÉRATION ACTIVE



MASSAGE & HYGIÈNE



CRYO & THERMO



LIBRAIRIE



RÉÉDUCATION DE LA MAIN

NOS UNIVERS | NOS PRODUITS

WINBACK
MY BODY IS BACK

GAME READY
ACCELERATED RECOVERY SYSTEM

ASL
A S A L A S E R
Research and Therapeutic Solutions

REAXING
TRAIN TO REACT

NORMATEC

TOTAL SOLUTION BRAND OF AIR COMPRESSION THERAPY SYSTEM
DOCTOR LIFE
Healthy care

G MOVE SUIT

DOKI Tape

KYNETT THERAGUN

WINSHOCK
CRYO STIM



DÉCOUVREZ
NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
WWW.SWIMS.STORE

 **swims**

+33 (0)4 83 66 16 66 | contact@swims.team | www.swims.team | www.swims.store
885 avenue du Dr Julien Lefebvre - 06270 Villeneuve-Loubet